


Lampa za pregled, sa priključkom za otoskop SPIRIT CK-907A [Instrulite™]

Deluxe višenamenska dijagnostička lampa

Uređaj dvostruke funkcije: lampa za pregled i mini-otoskop sa različitim dimenzijama nastavaka.

Odlikuje se punim fokusom mekog ovetljenja visokog intenziteta i prekidačem na dodir jedinstvenog dizajna.

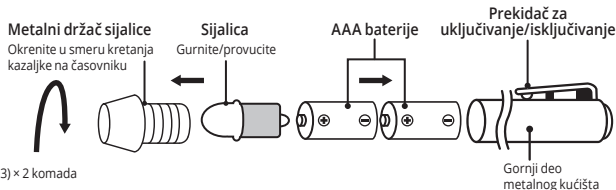

Tip baterija: „AAA” veličina (RO3) × 2 komada

Tip sijalice: LED sijalica 3,0 V

Važno:

- 1) Namenjeno za upotrebu od strane profesionalnog kvalifikovanog osoblja i obučених pojedinaca
- 2) Zakačite uređaj za džep/odeću radi sprečavanja slučajnog praznjenja baterija tokom nošenja
- 3) Koristite samo odgovarajući tip baterija i sijalice
- 4) Izvadite baterije kada ne koristite uređaj
- 5) Uređaj držite i čuvajte van domašaja dece
- 6) Nemojte kvasiti ili potapati uređaj u bilo koju tečnost
- 7) Koristite samo odgovarajući rastvor za čišćenje
- 8) Izbegavajte prekomerno izlaganje uređaja toploti ili direktnom sunčevom svetlu
- 9) Uređaj čuvati na sobnoj temperaturi
- 10) Iskorišćene baterije i sijalice odložite na otpad u skladu sa zakonskom regulativom

Proizvođač 	SPIRIT MEDICAL Co., Ltd. Including CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT Co. 2F, No. 68, Sec. 2, Guo Dao Rd, Luzhou Dist, New Taipei City 24766, TAIWAN
EU-zastupnik EC REP	SKLEP DLA LEKARZA Ul. sw. Szczepana 20a, 61-465 Poznan, POLJSKA sklepdla lekarza.com/pl/
Uvoznik / Ovlašćeni predstavnik proizvođača	PRIZMA KRAGUJEVAC DOO Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, SRBIJA www.prizma.rs
Broj rešenja ALIMS/Verzija	515-02-04301-21-003/11/2021

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Izjavljujemo da je proizvod saobrazan ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Zakonski rok saobraznosti iznosi **dve godine** od datuma kupovine proizvoda, a što se dokazuje fiskalnim ili drugim računom.

Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih nedostataka u izradi, isti će biti popravljen ili zamenjen bez novčane nadoknade.

Izjava se ne odnosi na:

- **Potrošni materijal:** baterije, sijalica i otoskop-nastavci
- **Pribor isporučen uz proizvod:** kutija za odlaganje
- **Proizvoda koji je neispravan usled:**
 - ◆ Mehaničkih oštećenja (krivicom kupca ili treće osobe) i curenja baterija
 - ◆ Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
 - ◆ Vršnja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
 - ◆ Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari groma i dr.



www.prizma.rs

SHOP online

PRIZMA KRAGUJEVAC DOO

Kragujevac, Kumanovska 8

Telefon: +381 (34) 330 200

Faks: +381 (34) 336 147

E-mail: info@prizma.rs

Prodavnice:

Beograd

- Pop Lukina 12
- Požeška 80
- Takovska 18
- Terazije 35
- Bulevar Kralja Aleksandra 170 (Deram)
- Bulevar Kralja Aleksandra 60

+381 (11) 328 65 55
+381 (11) 655 08 87
+381 (11) 655 08 88
+381 (11) 655 08 89
+381 (11) 735 95 15
+381 (11) 360 73 88

Novi Beograd

Zemun

Pančevo

Kragujevac

- Bulevar umetnosti 4 (Mercator Centar)
- Gospodska 11
- Svetog Save 5
- Kumanovska 8
- Dr Zorana Đinđića 9
- Kralja Aleksandra I Karađorđevića 58

+381 (11) 745 86 91
+381 (11) 655 87 13
+381 (13) 219 08 00
+381 (34) 330 200
+381 (34) 353 967
+381 (34) 356 890

Novi Sad

Subotica

Niš

Čačak

Kraljevo

Valjevo

Šabac

- Šafarikova 9
- Matka Vukovića 5
- Vožda Karađorđa 10
- Kuželjeva 25
- Cara Lazara 46
- Karađorđeva 59
- Vojvodve Mišića 15

+381 (21) 661 07 18
+381 (24) 552 926
+381 (18) 250 808
+381 (32) 515 02 01
+381 (36) 515 00 91
+381 (14) 315 01 64
+381 (15) 715 06 00



očitajte QR kod i pronađite
Vama najbližu prodavnicu

