

Uputstvo za upotrebu

Zahvaljujemo Vam na kupovini našeg visokokvalitetnog otoskopa. Najbolji materijali i stroga kontrola kvaliteta prilikom izrade garantuju preciznost prilikom dijagnostičkih procedura. Instrument je dizajniran da uz pravilno održavanje radi pouzdano dugi niz godina.

U uputstvu koji sledi navešćemo nekoliko saveta uz pomoć kojih ćete moći da najbolje iskoristite aparat u Vašem radu. Molimo Vas da pročitate uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate kao podsetnik.

1. Uključivanje instrumenta

Da bi instrument počeo da svetli, pomerite na levo prekidač koji se nalazi na ručici.

Da biste isključili instrument, vratite prekidač u prvobitni položaj.



2. Postavljanje uložka

Gurnite prošireni deo željenog uložka na metalni priključak i okrenite uložak u smeru kretanja kazaljke na satu. Ponovite proceduru u obrnutom smeru da biste skinuli uložak. Posle upotrebe uklonite uložak.



3. Sočivo za gledanje

Da biste sklonili sočivo tokom pregleda, pomerite ga prstom u levu ili desnu stranu.



4. Zamena lampice

Skinite glavu otoskopa tako što ćete je okretati u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu. Uхватите kraj lampice koja se nalazi u telu otoskopa i izvadite je iz ležišta. Zamenite staru



lampicu novom, vodeći računa da ne dodirnete njeno staklo. Prilikom stavljanja lampice, vođice na njoj i žljebovi u njenom ležištu moraju biti poravnati.

5. Zamena baterije

Za rad instrumenta potrebne su dve AA baterije (preporučujemo alkalne). Da biste ih zamenili, skinite donji poklopac na telu instrumenta tako što ćete ga okrenuti u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu. Zatim zamenite baterije, vodeći računa o njihovom polaritetu.



Čuvanje i održavanje

1. Instrument treba da koriste samo kvalifikovani lekari.
2. Zakačite ga za džep ili odeću radi sprečavanja slučajnog pražnjenja baterija tokom nošenja.
3. Koristite samo odgovarajući tip baterije i lampice.
4. Držati van domašaja male dece.
5. Ne potapati u bilo kakvu tečnost.
6. Čistiti samo odgovarajućim sredstvima za čišćenje.
7. Izbegavati preteranu izloženost visokim temperaturama ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
8. Čuvati na sobnoj temperaturi.
9. Iskorišćene baterije i lampice odložite na otpad u skladu sa zakonskom regulativom.

Upozorenje: instrument treba isključiti kada se ne koristi. Ukoliko ga nećete koristiti duži vremenski period, izvadite baterije iz instrumenta.



34000 Kragujevac, Kumanovska 8
Telefon: (0800) 200 000 (besplatan poziv),
(034) 330 200; Faks: (034) 336 147
E-mail: prizma@prizma.co.rs • www.prizma.co.rs

Predstavništva:

11000 Beograd, Pop Lukina 12; Telefon: (011) 32 86 555
21000 Novi Sad, Šafarikova 9; Telefon: (021) 66 10 718
24000 Subotica, Rudić 3; Telefon: (024) 552 926
18000 Niš, Svetozara Markovića 1; Telefon: (018) 255 770
36000 Kraljevo, Cara Lazara 46; Telefon: (036) 234 500
78000 Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 103; Telefon: (051) 212 437
85330 Kotor, Nativa, Dobrota bb, Telefon: (032) 330 835