

OMRON

NAZALNI TUŠ (NEB6014)

IM-NEB6014-SR-01-06/2018

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Namena

Medicinska namena:

Ovaj proizvod je sistem za nazalnu irigaciju i namenjen je za ispiranje nazalne i rino-faringealne šupljine.

Korisnici koji mogu rukovati ovim proizvodom:

- Zakonski sertifikovani medicinski stručnjaci, kao što su lekar, medicinska sestra i terapeut.
- Negovatelj ili pacijent pod nadzorom kvalifikovanih medicinskih stručnjaka za kućno lečenje.
- Korisnik takođe mora da razume opšti način rada ovog proizvoda i sadržaj ovog uputstva za upotrebu.

Pacijenti kojima je namenjen ovaj aparat:

Osobe kojima je potrebno ispiranje nazalne i rino-faringealne šupljine.

Okruženje:


Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u domaćinstvu.

Radni vek:

Nazalni tuš Pribl. 1 godina (100–120 terapija)


Vreme trajanje proizvoda može se razlikovati u zavisnosti od okruženja u kojem se koristi. Česta upotreba proizvoda može da skрати njegov radni vek.

Upoznajte proizvod

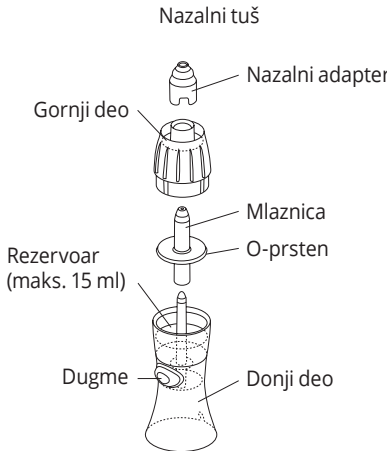

Kako funkcioniše nazalni tuš


Rastvor koji se upumpava kroz kanal za dovod meša se sa komprimovanim vazduhom koji stvara pumpa kompresora. Komprimovani vazduh pomešan sa rastvorom pretvara se u fine čestice spremne za irigaciju nazalnih i rinofaringealnih šupljina.

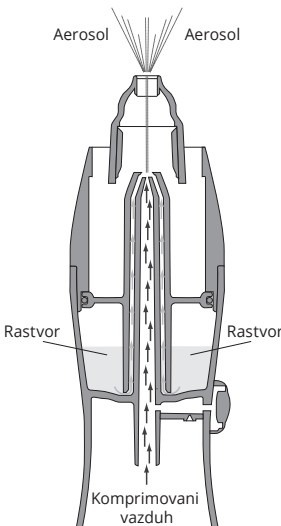

Način upotrebe

Priprema nazalnog tuša

1. Da biste dodali rastvor u rezervoar nazalnog tuša, uklonite gornji deo sa rezervoara kako je prikazano na slici.
2. Sipajte rastvor u rezervoar (maks. 15 ml).
3. Zatvorite nazalni tuš vraćanjem gornjeg dela nazad.
4. Povežite jedan kraj creva za vazduh sa nazalnim tušem, a drugi kraj sa kompresorom. Uključite kompresor da biste započeli sa terapijom.

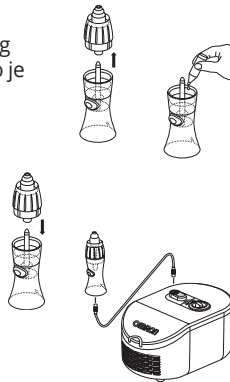

Rad nazalnog tuša

Upravlajte nazalnim tušem tako što ćete pritisnuti dugme i otpustiti ga pre/tokom izdisanja. Tokom terapije, drugu nozdrvu, na koju nazalni tuš nije primenjen, držite zatvorenom pomoću jednog prsta.

Kod dece ili pacijenata sa ograničenim sposobnostima, naizmenično primenjujte na dve nozdrve, uz promenu na svakih 10–20 sekundi. Neka Vam pri ruci bude maramica da biste osušili nozdrve ako dođe do curenja mukusa.

Kada aerosol počne da nestaje iz nazalnog tuša, terapija je gotova. Skinite gornji deo nazalnog tuša, uključujući i O-prsten. Ispraznite tečnosti ako postoje unutar gornjeg dela.



Napomena:

NIKADA NEMOJTE KORISTITI NAZALNI TUŠ U HORIZONTALNOM POLOŽAJU. NIKADA NEMOJTE NAGINJATI NAZALNI TUŠ VIŠE OD 60°.

Čišćenje i dezinfekcija

Pažljivo operite ruke pre čišćenja i dezinfekcije delova nazalnog tuša. Posle svake upotrebe očistite delove da biste uklonili ostatke rastvora. Ovo sprečava neefikasnu terapiju i smanjuje rizik od infekcije.

• Čišćenje nazalnog tuša:

U potpunosti rasklopите nazalni tuš. Operite delove toplom vodom i blagim, neutralnim deterdžentom. Dobro ih isperite čistom vrućom vodom, pažljivo ih otresite da biste uklonili preostalu vodu i ostavite ih da se osuše na čistom mestu. Preporučuje se da zamenite nazalni tuš nakon oko 100 do 120 terapija ili nakon oko 20 ciklusa prokuvavanja.

• Dezinfekcija nazalnog tuša:

Uvek dezinfikujte delove pre prve upotrebe proizvoda, nakon svake upotrebe i nakon dužeg nekorišćenja proizvoda, kao i nakon poslednje terapije tog dana. Ako su delovi izuzetno umrljani, zamenite nazalni tuš novim. **Nazalni tuš može da se dezinfikuje hemijskim dezinfekcionim sredstvom, kao što su etanol, natrijum hipohlorit (Milton), kvaternarni amonijum (Osvan), hlorheksidin (Hibitane) i amfoterični surfaktant (Tego),** uz pridržavanje uputstava za dezinfekciono sredstvo i ispiranje **čistom, toplom vodom.** Ostaviti da se osuši na vazduhu. **Napomena:** Nikada nemojte čistiti benzolom, razređivačem ili zapaljivom hemikalijom.

Prokuvavanje: Nazalni tuš takođe može da se dezinfikuje prokuvavanjem između 15 i 20 minuta u posudi sa puno vode. Nakon prokuvavanja, pažljivo izvadite delove, otresite višak vode i omogućite da se osuši na vazduhu u čistom okruženju.


Rešavanje problema

U slučaju da proizvod ne funkcioniše dobro, pogledajte sledeće:

- Prvo se uverite da je nazalni tuš ispravno sklopljen.
 - Uverite se da crevo za vazduh (nije uključeno u komplet) nije prignječeno niti savijeno.
 - Uverite se da je u nazalni tuš stavljena odgovarajuća količina rastvora.
- Ako se problem nastavi, obratite se preduzeću PRIZMA KRAGUJEVAC DOO

Tehnički podaci

Kategorija proizvoda:	Dodatna opciona oprema za aerosol terapiju
Opis proizvoda:	Nazalni tuš
Model:	NEB6014
Zapremina rezervoara za rastvor:	3 ml minimalno - 15 ml maksimalno
Veličina čestica:	90% čestica > 10µm
Brzina inhalacije (prema gubitku težine):	više od 5 ml/min (NaCl 0,9%)
Radna temperatura/vlažnost/vazdušni pritisak:	od +5 °C do +40 °C / od 15% do 85% RV / od 700 do 1060 hPa
Skladištenje i transport	
Temperatura/vlažnost/vazdušni pritisak:	od -20 °C do +60 °C / od 5% do 95% RV / od 500 do 1060 hPa
Težina:	Pribl. 30 grama
Dimenzije:	Pribl. Ø 50x139 (H) mm
Sadržaj:	Nazalni tuš, Uputstvo za upotrebu

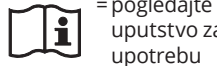

Aparat ispunjava uslove EC direktive 93/42/EEC (Direktiva za medicinske aparate).

Odlaganje

Na kraju očekivanog radnog veka, proizvod može da se odloži zajedno sa kućnim otpadom

Proizvođač 	3A HEALTH CARE S.r.l. Via Marziale Cerutti, 90F/G 25017 Lonato del Garda (BS) Italija
Distributer	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDIJA www.omron-healthcare.com
Podružnice	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, NEMAČKA www.omron-healthcare.com OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCUSKA www.omron-healthcare.com