

Anytime

Sistem za kontinuirano praćenje glukoze

CT3A

Kratko uputstvo

Delovi



Senzor



Transmitter (odašiljač)



Baza za punjenje



Kabl za punjenje

1 Priprema

Korak 1 Preuzmite aplikaciju

- Uključite Bluetooth
- Skenirajte QR kod sa pakovanja senzora ili transmitera (odašiljača) kako biste preuzeli aplikaciju ili preuzmite aplikaciju iz App store-a ili Google Play prodavnice
- Pratite uputstva kako biste se prijavili



1 Uključite Bluetooth



2 Registrujte se i ulogujte

Korak 2 Napunite transmitter (odašiljač)

- Postavite transmitter (odašiljač) u bazu za punjenje (punjač). Indikator punjenja će svetleti belo.
- Uklonite transmitter (odašiljač) sa baze za punjenje (punjača) kada indikator punjenja svetli plavo (što označava da je transmitter potpuno napunjen).



Indikator


Belo svetlo treperi: Punjenje
Plavo svetlo: Potpuno napunjen

Uklonite transmitter (odašiljač) nakon što se baterija potpuno napuni

2 Povezivanje uređaja

Korak 1 Povezivanje sa transmitterom (odašiljačem)

- Na strani aplikacije „Povezivanje odašiljača“ izaberite SN broj koji odgovara transmitteru koji posedujete, da biste dovršili povezivanje.

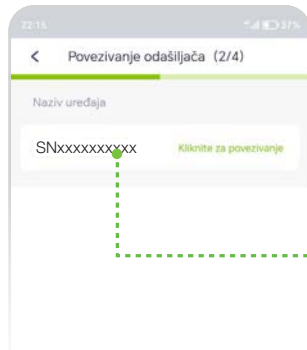

SNxxxxxxxx

Korak 2 Povezivanje sa senzorom

- Na strani aplikacije „Povezivanje senzora“, skenirajte QR kod sa poklopca pakovanja senzora (kao što je prikazano na slici ispod) kako biste pokrenuli inicijalizaciju senzora.




3 Postavljanje senzora

Korak 1

Preporuka: Postavljanje na abdomenu (trbuhu)

- Izaberite postavljanje senzora na abdomenu, (unutar 5 cm dijagonalno iznad pupka, u oblasti prikazanoj na slici), izbegavajući pojas, ožiljke i rebra.
- Dezinfikujte mesto uboda alkoholom i ostavite da se osuši na vazduhu pre sledećeg koraka.

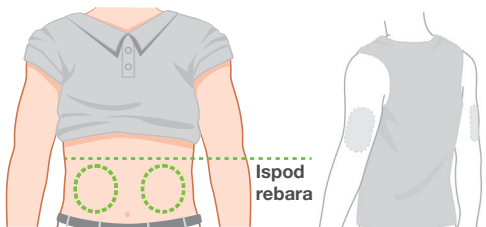

Postavljanje na nadlaktici:
Izaberite zadnju stranu nadlaktice

Korak 2

Ne „otključavajte“ senzor pre nego što isti ne prislonite na kožu

- Odvojite obe zaštitne folije sa površine senzora kao što je prikazano na slici.

Odvojite zaštitne folije



Korak 3


Ne „otključavajte“ senzor pre nego što isti ne prislonite na kožu

- Čvrsto prislonite senzor na mesto gde isti želite da postavite.




Korak 4

- Pomerite sigurnosnu bravu na gore da biste „otključali“ aplikator senzora.

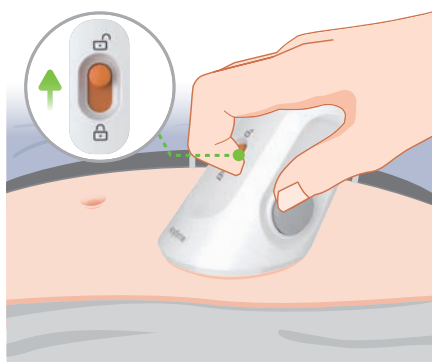


Korak 5

- Istovremeno pritisnite tastere sa obe strane aplikatora dok ne čujete „klik“.

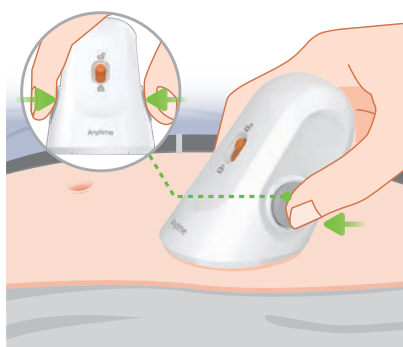

Korak 6

- Pažljivo uklonite aplikator kako biste završili postupak postavljanja.

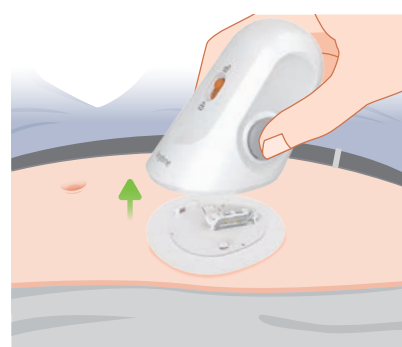

4 Postavljanje transmitera

Korak 1 ★ Važni koraci

- Pričvrstite transmitter (odašiljač) na senzor pod uglom koji je prikazan na slici ispod.



Pravilan način postavljanja




Pogrešan način postavljanja

Korak 2


- Čvrsto stisnite transmitter (odašiljač) i senzor kao što je prikazano na sledećoj slici dok se ne čuje zvuk „klik“.

⚠ Pogurajte transmitter (odašiljač) u suprotnom smeru, kako biste proverili da li je čvrsto (pravilno) postavljen.

1

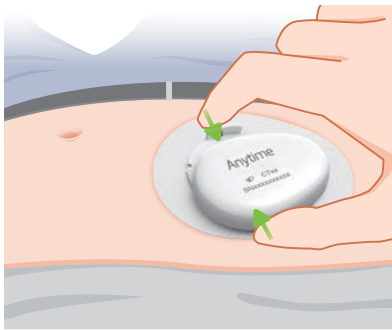

2

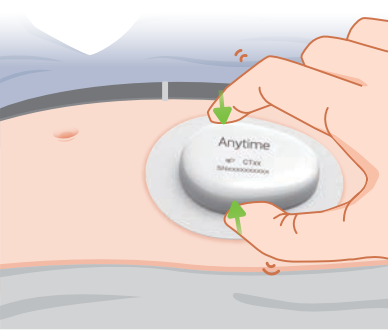


5 Interfejs aplikacije

- Nakon završetka perioda inicijalizacije (zagrevanja) od 1h, aplikacija počinje da prikazuje vrednost glukoze u međućeliskoj tečnosti.



Prekinite praćenje i uklonite sistem

- Nakon završetka sesije senzora od 14 dana, polako ukolonite kompletan sistem (senzor i transmitter), sa mesta nošenja.
- Nakon uklanjanja, pritisnite kopču senzora na dole i zarotirajte transmitter (odašiljač) kako biste odvojili transmitter od senzora.
- Odložite senzor kao medicinski otpad, a transmitter (odašiljač) sačuvajte za narednu upotrebu.

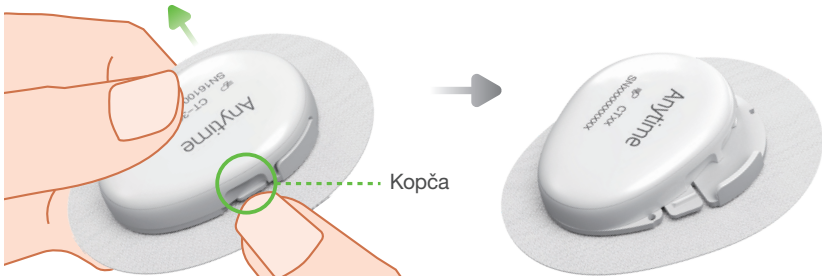

⚠ Sačuvajte transmitter (odašiljač) za buduću upotrebu

⚠ Transmitter (odašiljač) napuniti pre sledeće upotrebe novog senzora

PRIZMA KRAGUJEVAC DOO
Kragujevac, Kumanovska 8
BESPLATAN POZIV 0800 200 000
E-mail: info@prizma.rs



www.prizma.rs • online prodavnica

 Proizvođač		Zhejiang POCtech Co., Ltd., No. 1633 Hongfeng Road, Building 11 & 12, Huzhou City 313000, Zhejiang, KINA Tel: +86 400 118 8528 Web: www.poctechcorp.com	
EU	REP	Predstavnik u EU	Prolinx GmbH Brehmstr. 56, 40239, Duesseldorf, NEMAČKA
Uvoznik / Ovlašćeni predstavnik proizvođača		PRIZMA KRAGUJEVAC DOO Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, SRBIJA; www.prizma.rs	
Broj rešenja ALIMS / Verzija		001666298 2024 59010 009 000 515 059 04 004 / 09 / 2024	