

DIGITALNI TERMOMETAR sa fleksibilnim vrhom

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Model: DMT-4333

Upozorenje:

- Pročitajte instrukcije pažljivo pre korišćenja digitalnog termometra.
- Opasnost od gušenja: Gutanje poklopca odeljka za bateriju ili baterije može da dovede do fatalnog ishoda. Ne dozvolite deci da koriste ovaj uređaj bez nadzora odraslih.
- Ne gurajte termometar u uho, jer je on dizajniran za merenje temperature oralno, rektalno i aksilarno (ispod pazuha).
- Ne izlažite bateriju visokoj temperaturi, jer tada može da eksplodira.
- Uklonite bateriju iz termometra ako planirate da ga duže vreme ne koristite.
- Upotreba rezultata merenja temperature za samostalnu dijagnozu bolesti je opasna. Samodijagnoza može da dovede do pogoršanja postojeće bolesti. Konsultujte se sa svojim lekarom u vezi tumečenja rezultata merenja temperature.
- Ne pokušavajte merenje temperature kada je termometar vlažan, jer rezultat merenja može da bude pogrešan.
- Ne grizite termometar, jer tako možete da ga polomite i/ili se povredite.
- Deci uzrasta do 2 godine ovim termometrom nemojte oralno da merite temperaturu.
- Ako je termometar bio čuvan na temperaturi izvan opsega 5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F), pre upotrebe isti ostavite 15 minuta u prostoriji sa temperaturom u opsegu 5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F).
- Treba izbegavati upotreba termometra u neposrednoj blizini drugih uređaja, jer može da dođe do nepravilnosti u radu. Ako je rad u takvom okruženju neophodan, proverite pravilnost rada i termometra i drugih uređaja koji se nalaze u blizini.
- Prenosna VF komunikaciona oprema (uključujući periferne uređaje poput antenskih kablova i spoljnih antena kao i kablove specificirane od STRANE PROIZVOĐAČA) treba da bude udaljena najmanje 30 cm (12 inča) od termometra. U suprotnom može da dođe do pogoršanja njegovih karakteristika.
- Termometar nije namenjen za upotrebu u sredinama sa povišenom koncentracijom kiseonika i prisustvom zapaljivih anestetičkih smeša vazduha, kiseonika ili azot oksida.
- Ne izlažite termometar direktnom sunčevom svetlu, niti ga umotavajte u vatru, jer će to uticati na tačnost merenja.
- ME oprema (medicinska električna oprema) ne sme biti čišćena i dezinfikovana dok je u upotrebi.
- Svaki ozbiljan incident koji se dogodi povezano sa termometrom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom organu države u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalaze.

NAMENA

Digitalni termometri su namenjeni merenju telesne temperature kod ljudi u oralno, rektalno ili ispod pazuha. Ovi uređaji su višekratno upotrebljivi za kliničku ili kućnu upotrebu kod osoba svih uzrasta, uključujući decu mlađu od 8 godina uz nadzor odraslih.

KORISNICI KOJIMA JE NAMENJEN / INDIKACIJA ZA UPOTREBU:

Pacijenti ili zdrave osobe koje žele da izmere svoju telesnu temperaturu, i medicinski radnici koji žele da izmere telesnu temperaturu pacijenta.
Ciljna grupa pacijenata: Pacijenti ili zdrave osobe kojima je potrebno ili žele da im se izmeri temperatura.

PROČITAJTE PAŽLJIVO PRE UPOTREBE


Ovaj digitalni termometar omogućava brzo i tačno merenje telesne temperature. Digitalni termometar je namenjen za merenje telesne temperature oralno, rektalno ili aksilarno (ispod pazuha) i namenjen je za višekratnu upotrebu u kliničkom i kućnom okruženju kod ljudi svih starosnih doba. Za bolje razumevanje njegovog rada i pouzdanu upotrebu u narednim godinama, pročitajte najpre celo uputstvo.

Ovaj uređaj je izrađen u saglasnosti sa sledećim standardima:
ISO 80601-2-56 Medicinska elektronska oprema — Deo 2-56: Specifični zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse kliničkih termometara za merenje telesne temperature,
EN 60601-1-11 Medicinska elektronska oprema — Deo 1-11: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse – kolateralni standard: Zahtevi za medicinsku elektronsku opremu i medicinske elektronske sisteme koji se koriste u kućnim uslovima i zadovoljavaju zahteve standarda EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EC60601-1 (bezbednost).

SADRŽAJ PAKOVANJA

1 termometar, 1 uputstvo za upotrebu, 1 kutija za čuvanje.

ILUSTRACIJA PROIZVODA

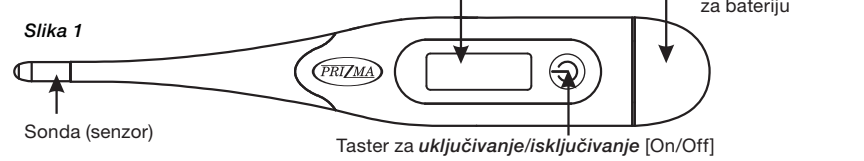

MERE OPREZA

-  Karakteristike termometra mogu da se pogoršaju u sledećim slučajevima:
 - Termometar se koristi izvan specificiranog radnog opsega temperatura i vlažnosti.
 - Termometar je čuvan izvan opsega temperatura i vlažnosti specificiranih za skladištenje.
 - Termometar je pretrpeo mehanički šok (npr. ispuštanje termometra) ili mu je oštećen senzor.
 - Temperatura pacijenta je niža od temperature okoline.
- Prenosna i mobilna VF komunikaciona oprema može da utiče na uređaj. Pridržavati se informacija o EMK koje su navedene u pratećoj dokumentaciji.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

	Oprez		MR nebezbedno		Tip BF primenjeni deo		Proizvođač
	Datum proizvodnje		Broj serije		Pogledati uputstvo za upotrebu		Opšti simbol za reciklažu
	Ograničenje vlažnosti za transport i skladištenje: 15% ~ 95% RVV						Medicinsko sredstvo
	Ograničenje atmosferskog pritiska					Ovlašćeni predstavnik u EU	
	Odlaganje na otpad ovog proizvoda i baterija treba da bude sprovedeno u skladu sa državnim propisima za odlaganje elektronskih proizvoda.					CE oznaka usaglašenosti 0123 predstavlja identifikacioni broj notofocorajućeg tela	
	Ograničenje temperature čuvanja i transporta: – 20 °C ~ 55 °C (– 4 °F ~ 131 °F)						
	Prva cifra 2: Zaštićeno od čvrstih stranih tela Ø 12,5 mm i većih. Druga cifra 7: Zaštićeno od efekta kratkotrajnog potapanja u vodu.						

SPECIFIKACIJE


Tip:	Digitalni termometar (bez predviđanja)		
Merni opseg:	32,0 °C ~ 42,9 °C (90,0 °F ~ 109,9 °F) (merna jedinica odabrana od strane proizvođača)		
Tačnost:	± 0,1 °C (± 0,2 °F) za rezultate u opsegu 35,5 °C ~ 42,0 °C (95,9 °F ~ 107,6 °F) pri temperaturi okoline od 18 °C ~ 28 °C (64,4 °F ~ 82,4 °F) ± 0,2 °C (± 0,4 °F) za rezultate van navedenog opsega i temperature okoline		
Režim rada:	Direktan	Ekran:	Tečni kristal (LCD), 3 1/2 cifre
Memorija:	Poslednja izmerena vrednost		
Baterija:	Jedna dugmasta baterija 1,5 V DC (veličina LR41 ili SR41, UCC 392)		
Radni vek baterije:	Oko 200 sati neprekidnog rada ili 1 godina sa 3 merenja dnevno		
Dimenzije:	13,9cm × 2,2cm × 1,2cm (D × Š × V)	Masa:	Oko 12 g uključujući bateriju
Očekivani životni vek:	3 godine	Kontraindikacije:	Nema kontraindikacija
Radni uslovi:	Temperatura: 5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F) Relativna vlažnost: 15% ~ 95% RVV Atmosferski pritisak: 700 hPa ~ 1060 hPa	Uslovi čuvanja i transporta:	Temperatura: – 20 °C ~ 55 °C (– 4 °F ~ 131 °F) Relativna vlažnost: 15% ~ 95% RVV Atmosferski pritisak: 700 hPa ~ 1060 hPa
IP klasifikacija:	IP 27	Klasifikacija:	Tip BF 

PROMENA MERNE JEDINICE

Prikazivanje izmerene vrednosti telesne temperature je moguće u °C (stepeni celzijusa) ili °F (stepeni farenhajta). Simbol °C/°F se prikazuje u gornjem desnom uglu ekrana. Da biste promenili jedinicu prikaza, dok je termometar isključen, držite pritisnutim taster za uključivanje/isključivanje oko 2 sekunde.

UPUTSTVA

- 1. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje pored ekrana. Oglašiće se zvučni signal, na ekranu će se pojaviti 100.0°C, a nakon toga poslednja izmerena vrednost telesne temperature.
- 2. Postavite termometar na željenu lokaciju (usta, rektum ili ispod pazuha).
 - a) Oralna upotreba: Postavite termometar ispod jezika kao što je označeno „✓” na slici 2. Zatvorite usta i dišite ravnomerno kroz nos kako udisan/izdisan vazduh ne bi uticao na rezultat.
 - b) Rektalna upotreba: Za lako umetanje, premažite vazelinom srebri ni vrh termometra (senzor). Lagano umetnite senzor oko 1 cm u rektum.
 - c) Aksilarna upotreba (ispod pazuha): Osušite brisanjem pazuh. Postavite vrh termometra ispod pazuha i rukom pritisnite isti. Iz medicinskog ugla ova metoda će uvek dati netačna očitavanja i ne treba je koristiti ukoliko se zahteva tačno merenje.
- 3. Tokom merenja simbol stepena treperi na ekranu. Kada treperenje prestane oglašiće se zvučni signal u trajanju od 10 sekundi. Izmerena vrednost temperature će se pojaviti na ekranu. Minimalno vreme merenja do oglašavanja zvučnog signala se mora ispoštovati bez izuzetka. Merenje se nastavlja i nakon zvučnog signala. Za dobijanje validnijih rezultata, preporuka je da se termometar zadrži u ustima i rektumu 2 minuta tj. 5 minuta ispod pazuha nakon zvučnog signala. Takođe, interval između merenja mora biti minimalno 30 sekundi.

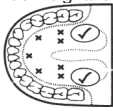

Slika 2

- * Napomena: normalno se zvučni signal oglašava sa „Bi-Bi-Bi-Bi”. Kada je izmerena temperatura 37,8 °C (100 °F) ili viša, alarm se oglašava brže sa „Bi-Bi-Bi----Bi-Bi-Bi----Bi-Bi-Bi”
- 4. Kako biste produžili životni vek baterije, isključite termomtar nakon završetka merenja pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje. Ukoliko ga ne isključite, automatski će se isključiti nakon 10 minuta.

MOGUĆI PROBLEMI I NJIHOVO OTKLANJANJE


Poruka o grešci	Problem	Rešenje
Lo	Izmerena temperatura je niža od 32,0 °C (90,0 °F).	Isključite termometar, sačekajte minut i ponovite merenje vodeći računa o kontaktu između termometra i mesta merenja kao i dovoljne pauze između merenja.
Hi	Izmerena temperatura je viša od 42,9 °C (109,9 °F).	Isključite termometar, sačekajte minut i ponovite merenje vodeći računa o kontaktu između termometra i mesta merenja kao i dovoljne pauze između merenja.
Err	Termometar ne funkcioniše ispravno.	Izvadite bateriju, sačekajte minut i vratite je. Ukoliko se poruka i dalje pojavljuje, obratite se Preduzeću PRIZMA KRAGUJEVAC DOO.
	Istrošena baterija: Simbol baterije treperi, merenje nije moguće.	Zamenite bateriju novom.

ZAMENA BATERIJE


- 1. Bateriju zamenite kada se simbol „ ” pojavi u donjem desnom uglu ekrana.
 - 2. Povucite poklopac odeljka za bateriju kao što je pokazano na slici 3.
 - 3. Nežno izvucite deo sa nosačem baterije za otprilike 1 cm (slika 4).
 - 4. Olovkom uklonite istrošenu bateriju. Odložite je poštujući lokalnu zakonsku regulativu. Istu zamenite novom baterijom 1,5V DC LR41 ili SR41, UCC392 ili ekvivalentom istih. „+” polaritet baterije treba biti orijentisan na gore (slika 5)
 - 5. Vratite nosač baterije i poklopac dela za baterije nazad.
- Napomena: Zamena baterije vrši se sa zadnje strane termometra, u skladu sa šematskim prikazom na slikama niže (3, 4, 5)



Slika 3

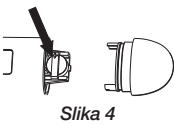

Slika 4

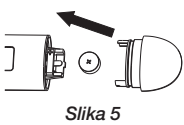

Slika 5

KALIBRACIJA

Termometar je prvobitno kalibrisan prilikom proizvodnje. Ukoliko se koristi prema uputstvu za upotrebu, periodično ponovno podešavanje nije potrebno. Međutim, preporučujemo proveru kalibracije svake dve godine ili kad god postoji sumnja u kliničku tačnost termometra.

Podesite temperaturu vodene kupke na 33,00 °C, 37,00 °C i 42,00 °C. Uključite termometar i potopite ga u vodenu kupku, zatim proverite laboratorijsku tačnost termometra. Ponovite merenje nakon što se sistem stabilizuje u periodu od 10 minuta.

Molimo da kompletan uređaj pošaljete preduzeću PRIZMA KRAGUJEVAC DOO.

Gore navedene preporuke ne zamenjuju zakonske obaveze. Korisnik se uvek mora pridržavati svih zakonskih propisa koji se odnose na kontrolu merenja, funkcionalnosti i tačnosti uređaja, a koji su definisani zakonima, direktivama ili važećim uredbama u zemlji u kojoj se uređaj koristi.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

- 1) Očistite površinu sonde termometra pomoću vode ili je obrišite čistom, mekom tkaninom navlaženom vodom kako biste uklonili površinsku prljavštinu.
- 2) Potopite sondu (senzor) termometra u destilovanu vodu 1 minut.
- 3) Koristite čistu, meku tkaninu kako biste obrisali termometar i uklonili eventualne ostatke;
- 4) Ponovite korake 2 i 3 tri puta sve dok nakon čišćenja prljavština više ne bude vidljiva pri vizuelnom pregledu;
- 5) Dezinfekcija:

Posle korišćenja ispod pazuha, oralno ili rektalno

Metod A (dezinfekcija visokog nivoa): Potopite sondu termometra u 0,55% OPA (Orto-ftalaldehid), kao što je CIDEX OPA, najmanje 12 minuta na temperaturi od 20 °C (68 °F);

Pre upotrebe ili posle upotrebe ispod pazuha

Metod B (dezinfekcija srednjeg nivoa): Koristite čistu, meku tkaninu navlaženu 70% medicinskim alkoholom, obrišite sondu 3 puta, najmanje po jedan minut svaki put.

- 6) Ponovite korake 2 do 4 kako biste uklonili ostatke dezinfekcionog sredstva;
- 7) Nakon što su čišćenje i dezinfekcija završeni proverite da li je izgled termometra neizmenjen i odložite isti u zaštitnu kutiju na rashlađeno, čisto, suvo mesto dalje od izvora toplote i/ili korozivnih materija.

PREDOSTROŽNOST

- 1. Termometar mora da bude očišćen i dezinfikovani pre i posle svake upotrebe.
- 2. Ukoliko je neophodno oralno ili rektalno merenje obavezna je dezinfekcija visokog nivoa.
- 3. Prilikom upotrebe gore pomenutih dezinfekcionih i sredstava za čišćenje strogo se pridržavajte uputstva za upotrebu istih.
- 4. Temperatura vode u svim gore opisanim postupcima ne sme da bude viša od 45 °C (113 °F).
- 5. Ne koristite benzen, razređivač boje, benzin ili druge jake rastvarače za čišćenje termometra.
- 6. Ne pokušavajte da dezinfikujete senzorsku sondu (vrh) termometra potapanjem u 70% izopropil alkohol, OPA ili u vruću vodu (voda toplija od 45 °C (113 °F)) tokom dužeg vremenskog perioda.
- 7. Nemojte koristiti ultrazvučni ili neki drugi automatski ili poluautomatski način da biste očistili termometar.
- 8. Nemojte koristiti postupke za dezinfekciju osim ovde gore opisanih. Postupci koji nisu odobreni mogu dovesti do trajnog oštećenja termometra.
- 9. Tokom radnog veka termometar može biti korišćen približno 3.000 puta uz pridržavanje gore navedenih postupaka čišćenja i dezinfekcije.

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Izjavljujemo da je proizvod saobrazan ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Zakonski rok saobraznosti iznosi dve godine od datuma kupovine proizvoda, a što se dokazuje fiskalnim ili drugim računom.

Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih nedostataka u izradi, isti će biti popravljen ili zamenjen bez novčane nadoknade.

Izjava se ne odnosi na:

- Potrošni materijal: baterije
- Pribor isporučen uz proizvod: kutija za odlaganje termometra
- Proizvod koji je neispravan usled:
 - ◆ Mehaničkih oštećenja (krivicom kupca ili treće osobe) i curenja baterija
 - ◆ Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
 - ◆ Vršanja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
 - ◆ Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari грома i dr.

Podaci o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMK)

Uređaj zadovoljava EMK zahteve međunarodnog standarda IEC 60601-1-2. Zahtevi su ispunjeni pod uslovima opisanim u tabeli ispod. Uređaj je električni medicinski proizvod i podleže posebnim merama predostrožnosti u pogledu EMK koji mora biti objavljen u uputstvu za upotrebu. Prenosna i mobilna VF komunikaciona oprema može da utiče na uređaj. Upotreba uređaja u kombinaciji sa neodobrenim priborom može negativno da utiče na uređaj i izmeni njegovu elektromagnetnu kompatibilnost. Uređaj ne bi trebalo da bude ili se koristi u neposrednoj blizini druge električne opreme.

Tabela 1

Podaci o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMK) – Elektromagnetska emisija	
DMT-4333 je namenjen za rad u niže opisanim okruženjima. Korisnici uređaja DMT-4333 treba da obezbede da se on koristi u takvim okruženjima.	
Test emisije	Usaglašenost
CISPR 11 – Emisija zračenjem	Ne primenjuje se
CISPR 11 Emisija zračenjem	Grupa 1 Klasa B
Emisija harmonika IEC 61000-3-2	Ne primenjuje se
Varijacije napona/ treperenje napona IEC 61000-3-3	Ne primenjuje se

Tabela 2

Podaci o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMK) – elektromagnetska imunost		
DMT-4333 je namenjen u niže opisanim okruženjima. Korisnici uređaja DMT-4333 treba da obezbede da se on koristi u takvim okruženjima.		
Test imunosti	IEC 60601 ispitni nivo	Nivo usaglašenosti
Elektrostatičko pražnjenje (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV kroz vazduh	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV kroz vazduh
Brze promene napona/burst IEC 610004-4	± 2 kV za linije napajanja 100 kHz frekvencija ponavljanja ± 1 kV za ulazno/izlazne linije	Ne primenjuje se
Tranzijenti napona IEC 61000-4-5	± 0,5 kV , ± 1 kV diferencijalno linija / linija	Ne primenjuje se
Propadi napona, kratki prekidi i promene napona na ulaznim linijama za napajanje IEC 61000-4-11	0 % U _T (100 % propad U _T *) tokom 0,5 perioda na 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315° 0 % U _T (100 % propad U _T *) tokom 1 perioda na 0° 70 % U _T (30 % propad U _T *) tokom 25/30 perioda na 0° 0 % U _T (100 % propad U _T *) tokom 250/300 perioda na 0°	Ne primenjuje se
Magnetno polje sa frekvencijom napajanja (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m; 50 Hz / 60 Hz	30 A/m; 50 Hz / 60 Hz
(*) NAPOMENA: U _T je napon napajanja u električnoj mreži pre primene ispitnog nivoa.		

 Odlaganje na otpad ovog proizvoda i iskorišćenih baterija treba da bude sprovedeno u skladu sa nacionalnim propisima za odlaganje na otpad elektronskih proizvoda.		
 JOYTECH Healthcare Co., Ltd. No.365, Wuzhou Road, 311100 Hangzhou, Zhejiang Province, NARODNA REPUBLIKA KINA		
EU REP	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, NEMAČKA	
Uvoznik / Ovlašćeni predstavnik predvođača	 PRIZMA KRAGUJEVAC DOO Kumanovska 8 34000 Kragujevac, SRBIJA www.prizma.rs	Broj rešenja ALIMS / Verzija 001736139 2024 59010 009 000 515 059 04 003 / 07-2024
 0123 Proizvod je u skladu sa zahtevima MDR (EU) 2017/745, „0123“ je identifikacioni broj notifikacionog tela.		

Tabela 3

Podaci o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMK) – elektromagnetska imunost		
DMT-4333 je namenjen u niže opisanim okruženjima. Korisnici uređaja DMT-4333 treba da obezbede da se on koristi u takvim okruženjima.		
Test imunosti	IEC 60601 ispitni nivo	Nivo usaglašenosti
Konduktivne VF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz do 80 MHz 6 Vrms 150 kHz do 80 MHz van ISM opsega	Ne primenjuje se
Izračene VF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz do 2,7 GHz	10 V/m
Bliska magnetna polja IEC 61000-4-39	30 kHz, 8 A/m, CW 134,2 kHz, 65A/m Pulsna modulacija 2,1 kHz 13,56 kHz, 7,5 A/m, Pulse Pulsna modulacija 50 kHz	30 kHz, 8 A/m, CW 134,2 kHz, 65A/m Pulsna modulacija 2,1 kHz 13,56 kHz, 7,5 A/m, Pulsna modulacija 50 kHz
NAPOMENA 1 – Na 80 MHz i 800 MHz, primenjuje se formula za sledeći viši opseg frekvencija.		
NAPOMENA 2 – Ove smernice možda ne važe u svim situacijama. Elektromagnetna propagacija je pogođena apsorpcijom i refleksijom od struktura, objekata i ljudi. a) ISM (industrijski, naučni i medicinski) opsezi između 0,15 MHz i 80 MHz su 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz; i 40,66 MHz do 40,70 MHz. Amaterski radio opsezi između 0,15 MHz i 80 MHz su 1,8 MHz do 2,0 MHz, 3,5 MHz do 4,0 MHz, 5,3 MHz do 5,4 MHz, 7 MHz do 7,3 MHz, 10,1 MHz do 10,15 MHz, 14 MHz do 14,2 MHz, 18,07 MHz do 18,17 MHz, 21,0 MHz do 21,4 MHz, 24,89 MHz do 24,99 MHz, 28,0 MHz do 29,7 MHz i 50,0 MHz do 54,0 MHz. b) Nivoi usaglašenosti u ISM frekventnim opsezima između 150 kHz i 80 MHz i u opsegu frekvencija od 80 MHz do 2,7 GHz namenjeni su smanjenju verovatnoće da mobilna/prenosiva komunikaciona oprema može izazvati interferenciju ako se nenamerno unese u prostorije sa pacijentima. Iz tog razloga, u formule korišćene za izračunavanje preporučene razdaljine odvajanja za predajnike u ovim frekvencijskim opsezima ugrađen je dodatni faktor od 10/3. c) Jačine polja od fiksnih predajnika, poput baznih stanica za radio (mobilne/bežične) telefone i zemaljske pokretne radiostanice, amaterskog radija, AM i FM radio emitovanja i televizijskog emitovanja, ne mogu se teorijski predvideti s preciznošću. Za procenu elektromagnetnog okruženja usled fiksnih RF predajnika, treba razmotriti elektromagnetno istraživanje lokacije. Ako izmerena jačina polja na lokaciji na kojoj se uređaj koristi premašuje primenjivi nivo usaglašenosti sa RF gore, uređaj treba posmatrati kako bi se proverio normalan rad. Ako se primeće nepravilnosti u radu, možda će biti potrebne dodatne mere, poput ponovnog usmeravanja ili premestanja uređaja. d) U opsegu frekvencija od 150 kHz do 80 MHz, jačine polja treba da budu manje od 3 V/m.		

Tabela 4

Preporučena najmanja razdaljina između pokretnih i mobilnih RF uređaja i opreme za bežičnu komunikaciju.				
DMT-4333 je namenjen za upotrebu u eketromagnetskom okruženju u kome su RF smetnje pod kontrolom. Korisnik može da spreči elektromagnetske smetnje tako što neće prinositi pokretnu i mobilnu RF komunikacionu opremu (predajnike) uređaju DMT-4333 bliže od razdaljina navedenih niže, a one su izračunate u skladu sa maksimalnom snagom komunikacione opreme.				
Frekvencija [MHz]	Maksimalna snaga [W]	Rastojanje [m]	IEC 60601 ispitni nivo	Nivo usaglašenosti
385	1,8	0,3	27	27
450	2	0,3	28	28
710	0,2	0,3	9	9
745				
780				
810	2	0,3	28	28
870				
930				
1720	2	0,3	28	28
1845				
1970				
2450	2	0,3	28	28
5240	0,2	0,3	9	9
5500				
5785				
NAPOMENA 1 - Preporuke nisu primenjive u svim situacijama. Na prostiranje elektromagnetskog zračenja utiče apsorpcija i refleksija od pregrada, objekata i ljudi.				

UPOZORENJA!

- Ovaj uređaj ne bi trebalo da se koristi u neposrednoj blizini drugih elektronskih uređaj poput mobilnih telefona, primopredajnika ili proizvoda kojima se upravlja daljinski. Ako to ipak morate da učinite, proverite ispravnost rada uređaja.
- Upotreba pribora i napojnog kabla koji nije odobren od strane proizvođača može da dovede do povećanja emisija ili smanjenja imunosti opreme ili sistema.
- Korisnik treba da održava osnovnu bezbednost i bitne performanse vezane za elektromagnetsku kompatibilnost (EMK).