


Lampa za pregled CK-907 [PENLIGHT - MINI]

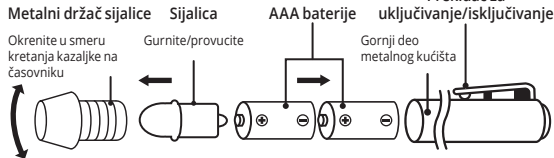

Koristite isključivo odgovarajuće baterije („AAA” veličina × 2 komada) i sijalicu (3,0 V LED).

Namena

Za dijagnostički postupak oučavanja vidljivih promena i stranih predmeta unutar spoljašnjeg uha, nosa, grla i oka.

Način upotrebe

Odvijte držač sijalice i postavite baterije. Pritisnite prekidač da aktivirate svetlo.

Održavanje

Očistite uređaj pre svake naredne upotrebe. Ne koristite nikakav organski rastvarač za čišćenje uređaja. Uvek isključite proizvod nakon upotrebe.

Upozorenje i predostrožnost

1. Izvadite baterije iz uređaja kada isti nećete koristiti duže vreme
2. Uređaj držite i čuvajte van domašaja dece
3. Nemojte kvasiti ili potapati uređaj u bilo koju tečnost
4. Izbegavajte prekomerno izlaganje uređaja toploti ili direktnom sunčevom svetlu
5. Koristite 2 alkalne baterije od 1,5 V (AAA) identičnog kvaliteta ili tipa
6. Iskorišćene baterije i sijalice odložite na otpad u skladu sa zakonskom regulativom
7. Ne vršite modifikaciju uređaja i opreme
8. Tokom pregleda ne dodirujte lampicu i pacijenta istovremeno
9. Namenjeno za upotrebu od strane profesionalnog kvalifikovanog osoblja i obučenih pojedinaca



Proizvođač 	SPIRIT MEDICAL Co., Ltd. Including CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT Co. 2F, No. 68, Sec. 2, Guo Dao Rd, Luzhou Dist, New Taipei City 24766, TAIWAN		
EU-zastupnik <table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	SKLEP DLA LEKARZA Ul. sw. Szczepana 20a, 61-465 Poznan, POLJSKA sklepdialekarza.com/pl/
EC	REP		
Uvoznik / Ovlašćeni predstavnik proizvođača	PRIZMA KRAGUJEVAC DOO Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, SRBIJA www.prizma.rs		
Broj rešenja ALIMS/Verzija	515-02-04301-21-003/11/2021		

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Izjavljujemo da je proizvod saobrazan ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Zakonski rok saobraznosti iznosi **dve godine** od datuma kupovine proizvoda, a što se dokazuje fiskalnim ili drugim računom. Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih nedostataka u izradi, isti će biti popravljen ili zamenjen bez novčane nadoknade.

Izjava se ne odnosi na:

- **Potrošni materijal:** baterije i sijalica
- **Proizvod koji je neispravan usled:**
 - ♦ Mehaničkih oštećenja (krivicom kupca ili treće osobe) i curenja baterija
 - ♦ Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
 - ♦ Vršnja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
 - ♦ Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari groma i dr.



www.prizma.rs

SHOPONLINE

PRIZMA KRAGUJEVAC DOO

Kragujevac, Kumanovska 8

Telefon: +381 (34) 330 200

Faks: +381 (34) 336 147

BESPLATAN POZIV **0800 200 000**

E-mail: info@prizma.rs

Prodavnice:

Beograd

- Pop Lukina 12
- Požeška 80
- Takovska 18
- Terazije 35
- Bulevar Kralja Aleksandra 170 (Deram)
- Bulevar Kralja Aleksandra 60

- +381 (11) 328 65 55
- +381 (11) 655 08 87
- +381 (11) 655 08 88
- +381 (11) 655 08 89
- +381 (11) 735 95 15
- +381 (11) 360 73 88

Novi Beograd

Zemun

Pančevo

Kragujevac

- Bulevar umetnosti 4 (Mercator Centar)
- Gospodska 11
- Svetog Save 5
- Kumanovska 8
- Dr Zorana Đinđića 9
- Kralja Aleksandra I Karađorđevića 58

- +381 (11) 745 86 91
- +381 (11) 655 87 13
- +381 (13) 219 08 00
- +381 (34) 330 200
- +381 (34) 353 967
- +381 (34) 356 890

Novi Sad

Subotica

Niš

Čačak

Kraljevo

Valjevo

Šabac

- Šafarikova 9
- Matka Vukovića 5
- Vožda Karađorđa 10
- Kuželjeva 25
- Cara Lazara 46
- Karađorđeva 59
- Vojvodve Mišića 15

- +381 (21) 661 07 18
- +381 (24) 552 926
- +381 (18) 250 808
- +381 (32) 515 02 01
- +381 (36) 515 00 91
- +381 (14) 315 01 64
- +381 (15) 715 06 00



očitajte QR kod i pronađite
Vama najbližu prodavnicu

