

Spirit[®]
SINCE 1975

CK-939

otoskop sa „Fiber optic” tehnologijom

Uputstvo za upotrebu

Zahvaljujemo Vam na kupovini našeg visokokvalitetnog otoskopa. Najbolji materijali i stroga kontrola kvaliteta prilikom izrade garantuju preciznost prilikom dijagnostičkih procedura. Instrument je dizajniran da uz pravilno održavanje radi pouzdano dugi niz godina.

U nastavku sledi nekoliko saveta uz pomoć kojih ćete moći da najbolje iskoristite instrument u Vašem radu. Molimo Vas da pročitate uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate kao podsetnik.

1. Uključivanje instrumenta

Da bi instrument počeo da svetli, pomerite prekidač koji se nalazi na ručici.



Kod tradicionalnog prekidača prema glavi instrumenta



Kod novog tipa prekidača pomerite u levo

Da biste isključili instrument, vratite prekidač u prvobitni položaj.

2. Postavljanje nastavka

Gurnite prošireni deo željenog nastavka na metalni priključak i okrenite nastavak u smeru kretanja kazaljke na satu. Ponovite proceduru u obrnutom smeru da biste skinuli nastavak. Posle upotrebe uklonite nastavak.



3. Sočivo za gledanje

Da biste sklonili sočivo tokom pregleda, pomerite ga prstom u levu ili desnu stranu.



4. Zamena sijalice

Skinite glavu otoskopa tako što ćete je okretati (odvijati) u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu. Uхватите kraj sijalice koja se nalazi u telu otoskopa i izvadite je iz ležišta. Zamenite staru sijalicu novom, vodeći računa da ne dodirnete njeno staklo. Prilikom stavljanja sijalice, vođice na njoj i žljebovi u njenom ležištu moraju biti poravnati.




Tradicionalni stil




Novi stil

5. Zamena baterija

Za rad instrumenta potrebne su dve AA baterije (preporučujemo alkalne). Da biste ih zamenili, skinite donji poklopac na telu instrumenta tako što ćete ga okrenuti u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu. Zatim zamenite baterije, vodeći računa o njihovom polaritetu.

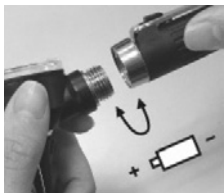

Tradicionalni stil

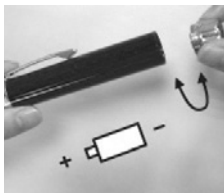

Novi stil

Čuvanje i održavanje

1. Instrument je namenjen za profesionalnu upotrebu od strane kvalifikovanog medicinskog osoblja.
2. Zakačite ga za džep ili odeću radi sprečavanja slučajnog pražnjenja baterija tokom nošenja.
3. Koristite samo odgovarajući tip baterija i sijalica.
4. Držati van domašaja male dece.
5. Ne potapati u bilo kakvu tečnost.
6. Čistiti samo odgovarajućim sredstvima za čišćenje (sočivo instrumenta ne brisati alkoholom).
7. Izbegavati prekomernu izloženost visokim temperaturama ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
8. Čuvati na sobnoj temperaturi.
9. Iskorišćene baterije i sijalice odložite na otpad u skladu sa zakonskom regulativom.

Upozorenje: instrument treba isključiti kada se ne koristi. Ukoliko ga nećete koristiti duži vremenski period, izvadite baterije iz instrumenta.



www.prizma.rs

SHOPONLINE

PRIZMA KRAGUJEVAC DOO

Kragujevac, Kumanovska 8

Telefon: +381 (34) 330 200; Faks: +381 (34) 336 147

BESPLATAN POZIV 0800 200 000

E-mail: info@prizma.rs

Prizma – prodavnice:

Beograd

- Pop Lukina 12 +381 (11) 328 65 55
- Požeška 80 +381 (11) 655 08 87
- Takovska 18 +381 (11) 655 08 88
- Terazije 35 +381 (11) 655 08 89
- Bulevar Kralja Aleksandra 170 (Đeram) +381 (11) 735 95 15
- Bulevar Kralja Aleksandra 60 +381 (11) 360 73 88

Novi Beograd

- Bulevar umetnosti 4 (Mercator Centar) +381 (11) 745 86 91

Zemun

- Gospodska 11 +381 (11) 655 87 13

Pančevo

- Svetog Save 5 +381 (13) 219 08 00

Kragujevac

- Kumanovska 8 +381 (34) 330 200
- Dr Zorana Đinđića 9 +381 (34) 353 967
- Kralja Aleksandra I Karađorđevića 58 +381 (34) 356 890

Čačak

- Kuželjeva 25 +381 (32) 515 02 01

Kraljevo

- Cara Lazara 46 +381 (36) 515 00 91

Valjevo

- Karađorđeva 59 +381 (14) 315 01 64

Šabac

- Vojvode Mišića 15 +381 (15) 715 06 00

Niš

- Vožda Karađorđa 10 +381 (18) 250 808

Novi Sad

- Šafarikova 9 +381 (21) 661 07 18

Subotica

- Matka Vukovića 5 +381 (24) 552 926



Proizvođač 	SPIRIT MEDICAL Co., Ltd. Including CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT Co. 2F, No. 68, Sec. 2, Guo Dao Rd, Luzhou Dist, New Taipei City 24766, TAIWAN		
EU-zastupnik <table border="1" data-bbox="83 2419 277 2507"> <tr> <td>EC</td><td>REP</td></tr> </table>	EC	REP	SKLEP DLA LEKARZA Ul. sw. Szczepana 20a, 61-465 Poznan, POLSKA sklepdla lekarza.com/pl/
EC	REP		
Uvoznik / Ovlašćeni predstavnik proizvođača	PRIZMA KRAGUJEVAC DOO Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, SRBIJA www.prizma.rs		
Broj rešenja ALIMS/Verzija	515-02-00557-18-001/08/2018		

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI



Izjavljujemo da je proizvod saobrazan ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Zakonski rok saobraznosti iznosi **dve godine** od datuma kupovine proizvoda, a što se dokazuje fiskalnim ili drugim računom.

Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih nedostataka u izradi, isti će biti popravljen ili zamenjen bez novčane nadoknade.

Izjava se ne odnosi na:

Potrošni materijal:

baterije, sijalica i otoskop-nastavci

Pribor isporučen uz proizvod:

torbica za odlaganje

Proizvod neispravan usled:

- ◆ Mehaničkih oštećenja (krivicom kupca ili treće osobe) i curenja baterija
- ◆ Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
- ◆ Vršnja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
- ◆ Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari groma i dr.



PRIZMA KRAGUJEVAC DOO