


**Poštovani korisniče,**

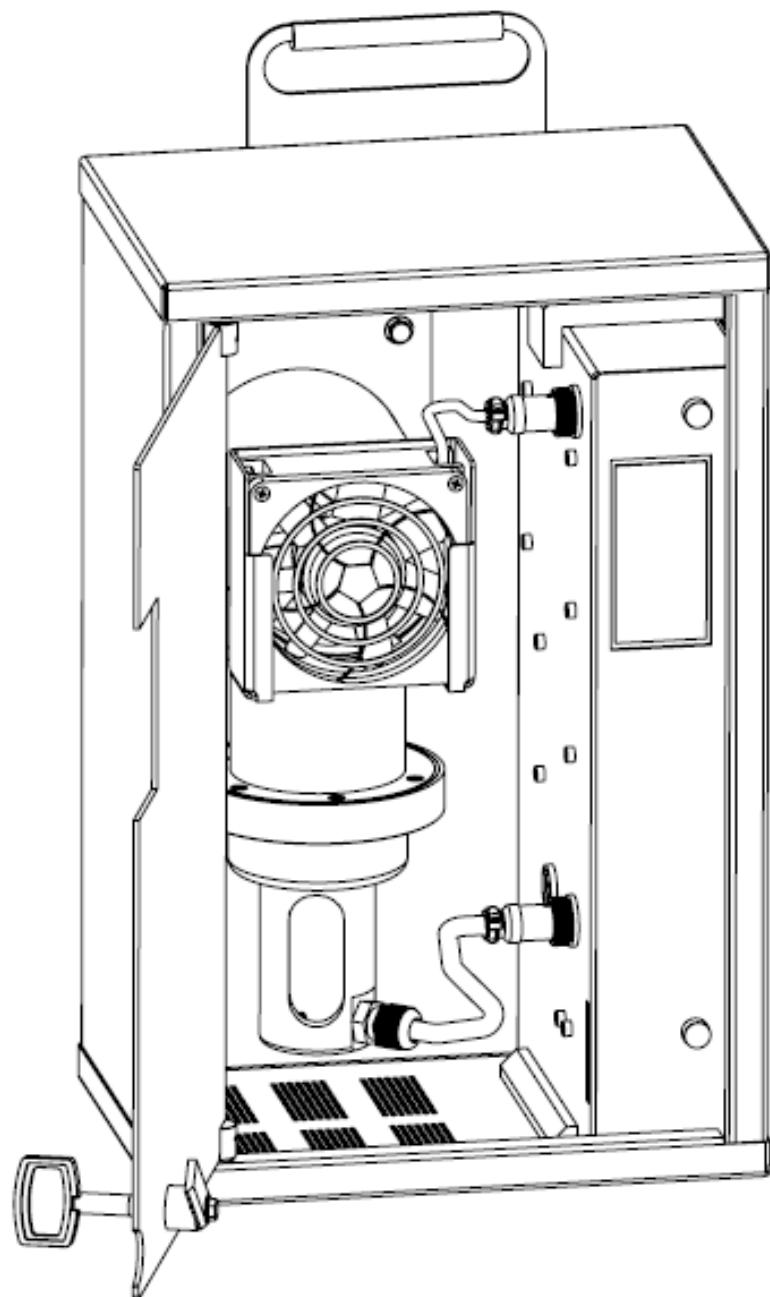

Hvala Vam što ste kupili ovaj PRIZMIN uređaj. Pročitajte pažljivo uputstvo za upotrebu pre upotrebe uređaja da biste ga koristili bezbedno i ispravno. Neka Vam uputstvo uvek bude pri ruci.

Uređaj uvek koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu.

# Sadržaj

## OBAVEZNO PROČITAJTE

Izuzeci od odgovornosti .....	1
Bezbednosne napomene .....	2

## OPIS PROIZVODA

Bitne osobine proizvoda .....	6
Princip rada .....	7
Sastavni delovi proizvoda .....	8

## INSTALACIJA

Instalacija .....	9
-------------------	---

## KORIŠĆENJE PROIZVODA

Priprema za korišćenje .....	11
Kako koristiti uređaj .....	12
Završetak korišćenja .....	15

## ODRŽAVANJE PROIZVODA

Održavanje proizvoda .....	15
Čišćenje proizvoda .....	16
Skladištenje proizvoda. ....	18

## PROBLEMI U RADU

Problemi u radu .....	19
-----------------------	----

## Odlaganje proizvoda

Ispravno odlaganje proizvoda (električni i elektronski otpad) .....	20
---	----

## SPECIFICATIONS

Tehnički podaci .....	21
-----------------------	----

## Lista izmena dokumenta

Verzija	Datum	Opis izmena
1.0	Septembar 2018.	Početno izdanje

# Izuzeci od odgovornosti

**Molimo Vas da razumete da PRIZMA nije odgovorna u sledećim slučajevima:**

1. Problemi ili šteta nastala održavanjem ili servisiranjem uređaja koje nije izvršila PRIZMA ili PRIZMINI ovlašćeni distributeri.
2. Problemi ili šteta nastala zbog upotrebe proizvoda i materijala koje nije isporučila PRIZMA.
3. Problemi ili šteta nastala ako se pri održavanju ili servisiranju koriste rezervni delovi koje nije odobrila PRIZMA.
4. Problemi ili šteta nastala zato što korisnik uređaja nije pročitao upozorenja o bezbednosti ili se nije pridržavao preporuka za korišćenje uređaja navedenih u ovom uputstvu.
5. Problemi ili šteta nastala zbog odstupanja radnih uslova od onih navedenih u ovom uputstvu, uključujući i napajanje i uslove okoline u kojoj je instaliran uređaj.
6. Problemi ili šteta nastala zbog nestručnih izmena na uređaju ili zbog nestručne popravke uređaja.
7. Problemi ili šteta nastala zbog više sile, kao što su požar, zemljotres, poplava ili udar groma.

1. Sadržaj ovog uputstva podložan je promenama zbog poboljšanja, bez prethodnog upozorenja.
2. Sadržaj uputstva pažljivo je pripreman i proveravan. Ipak, ako pronađete neku grešku molimo Vas da o tome obavestite lokalnog predstavnika ili distributera PRIZME.
3. Zabranjeno je bez dozvole PRIZME kopirati ovo uputstvo, u celini ili delimično. Ako niste korisnik uređaja koji ga koristi za svoje lične (službene) potrebe, u skladu sa Zakonom o autorskim pravima, nije Vam dozvoljeno korišćenje ovog uputstva.

# Bezbednosne napomene

- Znaci upozorenja i primeri simbola prikazani ovde navedeni su kako biste ovaj proizvod bezbedno i ispravno koristili i smanjili rizik od povreda.
- Izgledi simbola i njihova značenja su:

Znak upozorenja	Značenje
 <b>Upozorenje</b>	Ukazuje na mogućnost nastupanja smrti ili opasne telesne povrede usled nepoštovanja uputstva.
 <b>Oprez</b>	Ukazuje na mogućnost nastanka telesne povrede ili materijalne štete* usled nepoštovanja uputstva.

\* Pod materijalnom štetom podrazumeva se širok opseg šteta na kući, pokućstvu, domaćim životinjama i ljubimcima.

Primeri znakova		
Znak  ukazuje da treba obratiti pažnju (upozorenja i opasnosti). Objašnjenje razloga za upozorenje nalazi se u tekstu ili slikama pored  .	 Znak "opasnost od požara"	 Znak "opasnost od strujnog udara"
Znak  ukazuje na zabrane (ono što ne smete da uradite). Objašnjenje razloga za zabranu nalazi se u tekstu ili slikama pored  .	 Znak "zabranjeno rasklananje"	 Znak "opšta zabrana"
Znak  označava nešto što treba proveriti (ili stalno treba imati u vidu). Objašnjenje razloga za upozorenje nalazi se u tekstu ili slikama pored  .	 Znak "opšte upozorenje"	 Znak "isključite napojni kabl"

## Upozorenje

Koristite samo soli odobrene za upotrebu u medicinske svrhe.

- Možete pogoršati svoje zdravstveno stanje.

Svaki put posle upotrebe pažljivo očistite uređaj.

- U uređaju se tokom rada taloži so koja je veoma korozivna. Može doći do korozije i propadanja pojedinih delova uređaja.

U slučaju bilo kakvog problema sa Vašim uređajem, molimo Vas da stupite u vezu sa Vašim lokalnim servisom PRIZME (adresa je na pakovanju ili unutar njega).



# Bezbednosne napomene

<p>Ne koristite uređaj u blizini eksplozivnih gasova ili u zonama sa visokim rizikom od ekspozije.</p> <p>Dozvoljeno je raspršivanje samo soli.</p> <p>Ne rasklapajte uređaj dok je priključen na električnu mrežu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Možete doživeti strujni udar ili se povrediti.</li></ul>	
<p>Ne uključujte i ne isključujte kabl za napajanje iz električne mreže ako su vam mokre ruke.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Možete doživeti strujni udar ili se povrediti.</li></ul> <p>Ne perite uređaj vodom, ne prskajte uređaj vodom.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• U uređaju može nastati kratak spoj ili možete doživeti strujni udar.</li></ul>	

<b>⚠ Upozorenje</b>	
<p>Uređaj je namenjen samo za korišćenje suve soli.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako se pokuša upotreba drugih materija, može doći do oštećenja delova uređaja ili do nepravilnog rada uređaja.</li></ul> <p>Relativna vlažnost vazduha u prostoriji mora biti <b>ispod 40%</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako je relativna vlažnost vazduha u prostoriji viša može doći do pogoršanja karakteristika rada uređaja.</li></ul> <p>Ako su delovi uređaja već bili zaprljani pre korišćenja, očistite ih pre upotrebe.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako u uređaju ima zaostale soli, može doći do pogoršanja karakteristika rada uređaja.</li></ul> <p>Odlaganje na otpad ovog uređaja treba obaviti u skladu sa nacionalnim propisima za deponovanje elektronskih uređaja.</p>	

<b>⚠ Upozorenje</b>	
<p>Ako se uređaj duže vreme neće koristiti, proverite da li je kabl za napajanje izvučen iz električne mreže.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Možete doživeti strujni udar ili uređaj može da se zapali zbog curenja struje.</li></ul> <p>Proverite da li je uređaj isključen i da li je kabl za napajanje izvučen iz električne mreže tokom instalacije, premeštanja ili održavanja uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Možete doživeti strujni udar ili se povrediti.</li></ul> <p><b>Koristite isključivo kabl za napajanje dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Ne gledajte u otvor iz koga izlazi aerosol.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velika količina soli može dospeti u oči i izazvati povrede.</li></ul> <p>Ne punite rezervoar nikakvim materijama, osim suvom soli za medicinsku upotrebu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Može doći do pogoršanja karakteristika ili oštećenja uređaja.</li></ul> <p>Ne koristite kabl za napajanje ako je oštećen, niti ga priključujte u lošu električnu utičnicu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Možete doživeti strujni udar, može doći do kratkog spoja u uređaju ili do njegovog zapaljenja.</li></ul> <p>Ne grebite, ne trljajte, ne popravljajte, ne previjajte, ne vucite, ne uvijajte kabl za napajanje. Ne stavljamte teške predmete preko kabla. Držite kabl podalje od toplih ili vrućih predmeta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Možete doživeti strujni udar ili se može zapaliti uređaj zbog kratkog spoja izazvanog oštećenjem izolacije kabla.</li></ul>	

# Bezbednosne napomene

<p>Ne rasklapajte, ne popravljajte i ne vršite nikakve izmene na uređaju.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uredaj može da se pokvari ili može izazvati povrede.</li><li>• Uredaj ne poseduje delove za koje je predviđeno servisiranje od strane korisnika.</li></ul> <p>Ustupavate vezu sa najbližim servisom PRIZME.</p>	
<p>Proverite da li napon napajanja odgovara naponu navedenom u specifikacijama uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uredaj može da se zapali ili možete doživeti strujni udar.</li></ul> <p>Ne priključujte više uređaja na jednu mrežnu utičnicu za napajanje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uredaj može da se zapali ili možete doživeti strujni udar.</li></ul> <p>Kada isključujete kabl za napajanje iz električne mreže, ne vucite kabl, već rukom uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Može doći do prekida ili kratkog spoja u kablu za napajanje. Oni mogu izazvati požar ili možete doživeti strujni udar.</li></ul>	
<p>Ne otvaraj vrata halogeneratora tokom rada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unutar uređaja postoje rotirajući delovi. U slučaju da ih dodirnete možete da se povredite.</li></ul>	<p>WARNING</p>  <p>DO NOT OPEN DURING OPERATION</p>

# Bezbednosne napomene

## Opšta uputstva

Ne koristite uređaj za druge svrhe, osim za proizvodnju suvog aerosola soli.

Ne koristite delove i dodatke osim onih navedenih u ovom uputstvu.

Ne sipajte u posudu mlina više od 40g suve soli.

Ne blokirajte ventilacione otvore na dnu uređaja.

Ne koristite uređaj ako je deflektor skinut sa izlazne cevi uređaja.

- Velika količina soli može doći u dodir sa licem i očima.

Posle čišćenja delova, delovi treba da se potpuno osuše pre sklapanja.

Ne brišite telo uređaja isparljivim hemikalijama, kao što su benzin i razređivači.

Iako uređaj zadovoljava propise o EMC (elektromagnetska kompatibilnost), treba izbegavati njegovu upotrebu u neposrednoj blizini ostalih električnih uređaja.

Ne dozvolite da uređaj bez nadzora koriste deca ili nesvesne osobe.

Ovaj uređaj treba da bude instaliran u skladu sa nacionalnim propisima o električnoj instalaciji.

Ovaj uređaj ne sme biti dostupan za javnu upotrebu.

## Održavanje

Pre upotrebe uređaja proverite da li on radi normalno i bezbedno.

## Šta raditi u slučaju kvara ili akcidenta

U slučaju kvara odmah postupite na sledeći način:

- 1) Isključite uređaj i izvucite kabl za napajanje iz mrežne utičnice..
- 2) Na uređaj stavite natpis "Neispravan - ne koristiti".
- 3) Stupite u vezu sa prodavnicom u kojoj ste kupili uređaj ili sa najbližim predstavnikom PRIZME

# Opis proizvoda


## Bitne osobine proizvoda

- 1** Sva elektronika i mehanički delovi se nalaze unutar jednog ormana. Uređaj se napaja iz električne mreže, preko kabla za napajanje.
- 2** Ekran osetljiv na dodir prikazuje redni broj izabranog programa seanse, doziranja soli tokom trajanja seanse, vreme do kraja i greške u toku rada. Pozadinsko osvetljenje ekrana omogućava čitanje i u mraku.
- 3** Preko ekrana nalazi se površina osetljiva na dodir. Pomoću nje se interaktivno upravlja uređajem. U uređaj je ugrađena zujalica koja se oglašava kratkim tonom kada korisnik pritisne neku od komandi na ekranu.
- 4** Uređaj koristi slobodni ISM opseg na 2.4GHz, koristeći BLUETOOTH komunikaciju. U slučaju da se uređaj koristi u blizini drugih uređaja sa bežičnom komunikacijom, uključujući mikrotalasnu pećnicu i wireless LAN, i koristi isti frekvencijski opseg, postoji mogućnost za pojavu ometanja između ovih i drugih sličnih uređaja. Ukoliko se ometanja dogode, prestanite sa upotrebom drugih uređaja.





## Princip rada

- 1) Mlin usitnjava so i pravi od nje čestice slane prašine različite veličine, od nekoliko mikrona do delova milimetra.
- 2) Struja vazduha ventilatora izvlači iz mlina čestice koje su dovoljno male i lake i izbacuje ih kroz izlazni otvor uređaja.
- 3) Vazduh na izlazu uređaja udara u deflektor. Krupne i teške čestice soli nisu u stanju da prate naglu promenu smera strujanja vazduha, udaraju u deflektor i padaju na zemlju. Sitne i lake čestice soli mogu da prate tok vazduha iz ventilatora, zaobilaze ploču deflektora i dospevaju u vazduh u slanoj sobi.
- 4) Predviđeno je da se uređaj montira na spoljnom zidu slane sobe ili kabine, da su pacijenti u slanoj sobi ili kabini, a da je operater u blizini uređaja.

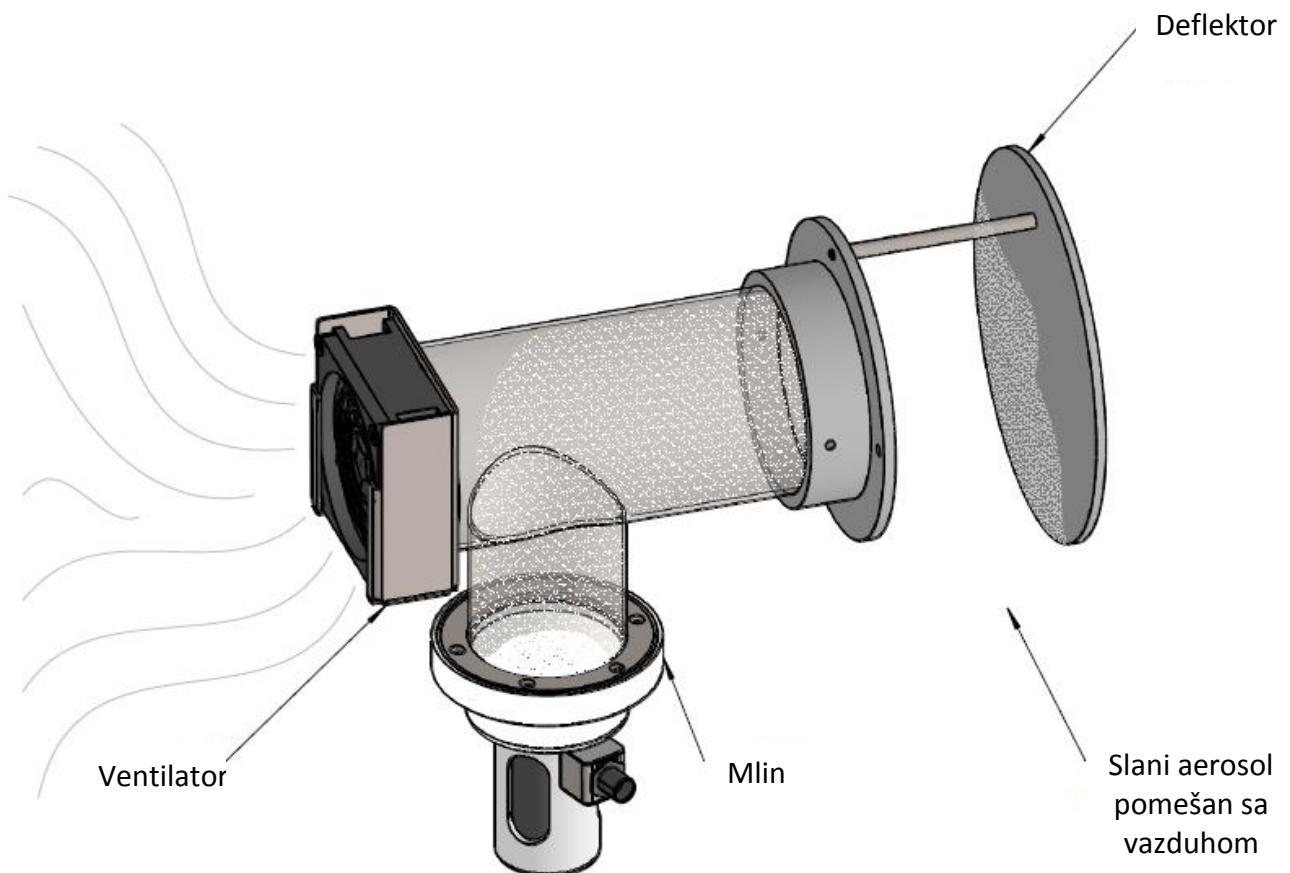


# Opis proizvoda


## Sastavni delovi proizvoda

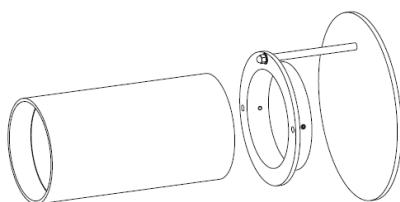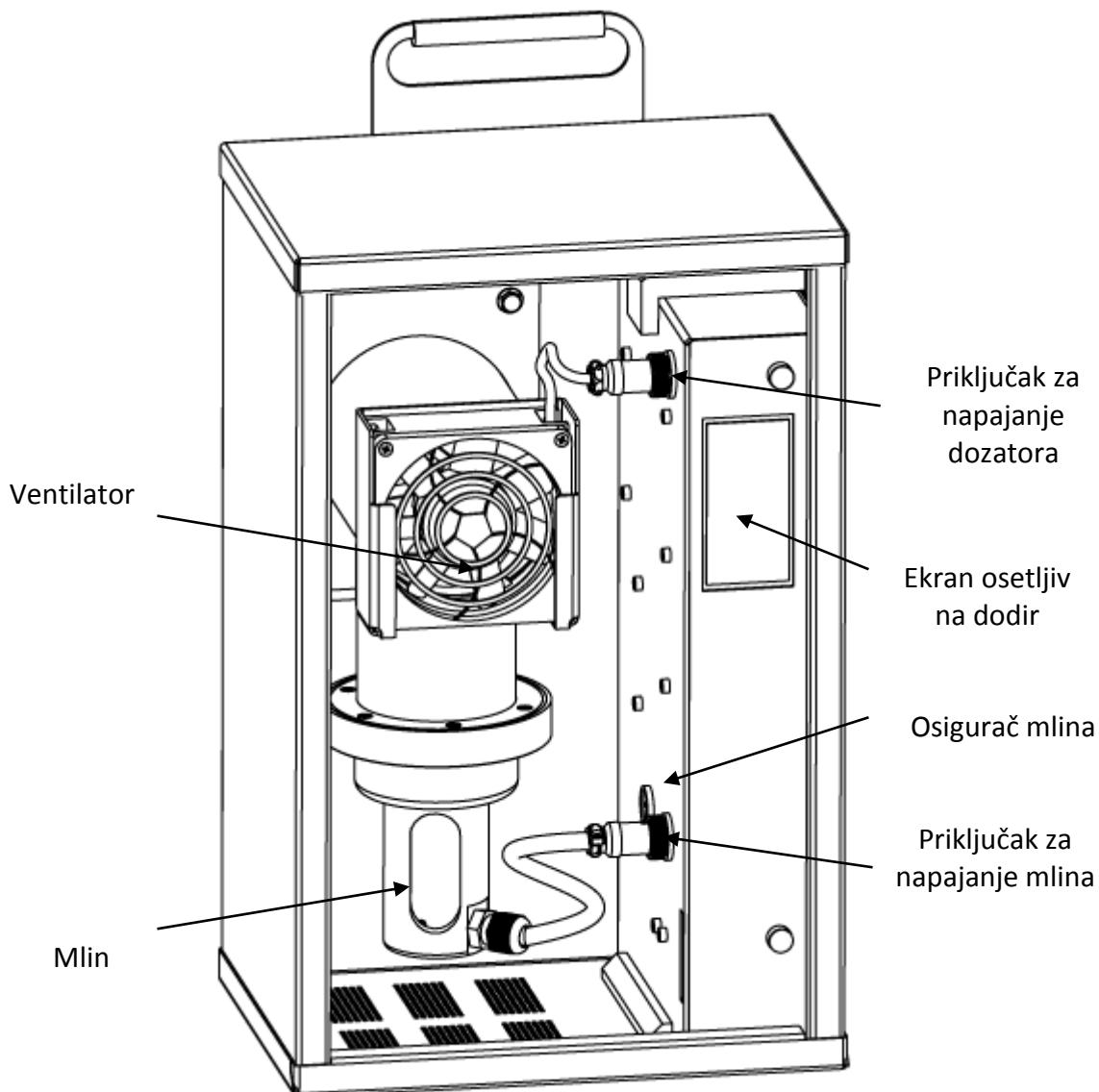

Produžna cev Deflektor

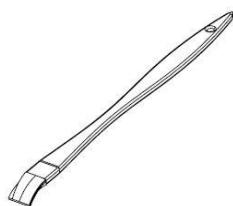


Četke 2 kom

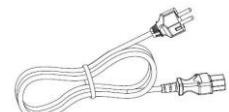

Kabl za napajanje

## Instalacija proizvoda


1. Na spoljnom zidu slane sobe odaberite odgovarajuću poziciju za halogenerator. Centar izlaznog otvora treba da bude oko 1m visine od poda.

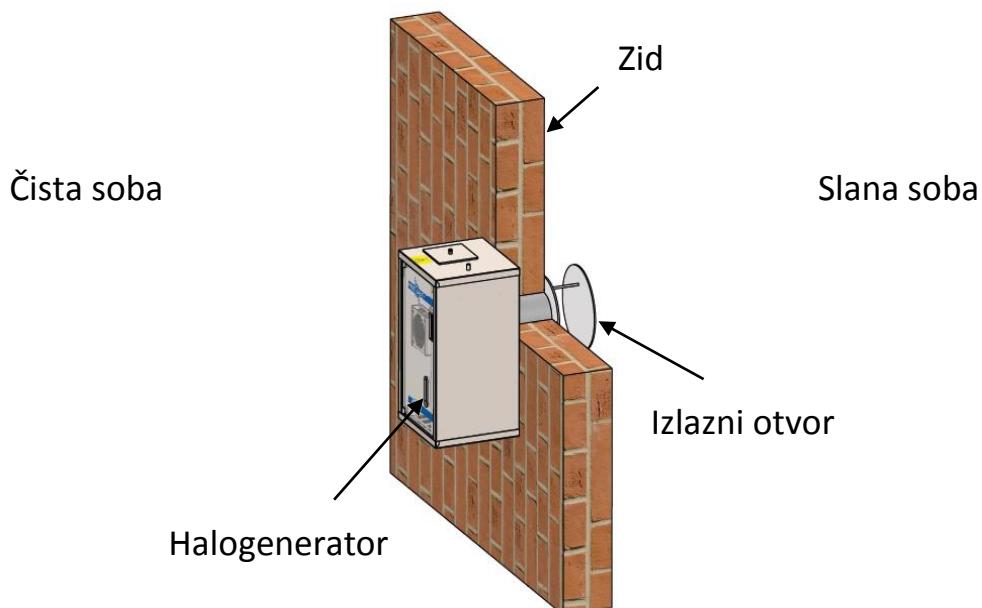

2. Koristeći šablon za označavanje rupa, na zidu van slane sobe obeležite 4 pozicije rupa za tiplove i rupu za izlazni otvor vazduha od 90 mm.
3. Probušite rupu za izlazni otvor vazduha prečnika 90 mm.
4. Probušite 4 rupe za tiplove prečnika 8 mm i postavite tiplove u njih.
5. Postavite halogengenerator preko pripremljenih otvora i pričvrstite ga za tiplove sa 4 metalna zavrtnja 5.5 x 60 mm - DIN7997.


**Napomena: Za detaljne instrukcije pogledajte prateće uputstvo za montažu.**

6. Priklučite kabl za napajanje na konektor sa donje strane uređaja i utaknite u uzemljenu utičnicu.

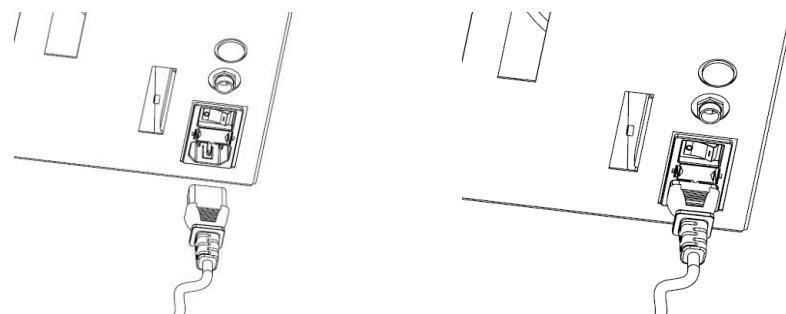


**Napomena: Utičnica kabla za napajanje nalazi se na donjoj strani uređaja.**

**UPOZORENJE: Koristite isključivo kabl za napajanje dobijen od proizvođača.**

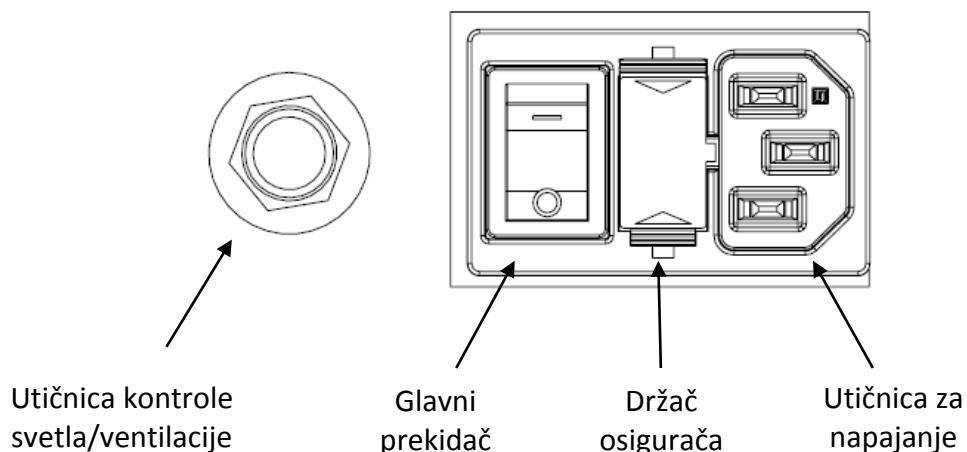

**Napomena:** Kabl za napajanje se smatra rastavljuјućim uređajem. Utičnica iz koje se napaja uređaj mora biti lako dostupna operateru.

7. Ako se koriste spoljna kola za upravljanje ventilacijom i svetлом, priključite utikač za kontrolu spoljnih kola (srednji provodnik utikača je uvek pod naponom +24VDC, oklop kabla je na naponu od 0V kada ventilator u halogeneratoru radi, a iskljucen je kada je halogenator zaustavljen). Utikač može da provodi samo struju za jedan signalni relej čiji namotaj radi na 24VDC (max struja 100mA).

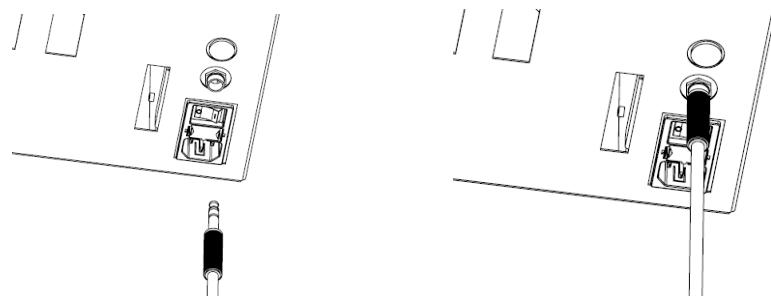

**Napomena:** Utičnica za upravljanje spoljnim kolima nalazi se sa donje strane uređaja.


8. Priključite drugi kraj kabla za napajanje u uzemljenu mrežnu utičnicu.

# Priprema za korišćenje

## 1. Dodavanje soli.

Uhvate rukom mlin, zarotirajte ga ①.


Povucite mlin na dole i izvadite ga iz halogeneratora.

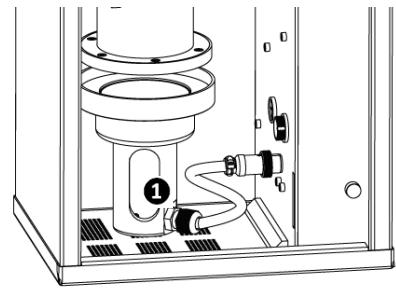

Pripremite so za upotrebu. Da bi uređaj korektno radio, so mora biti suva.


Ukoliko je so vlažna, neophodno ju je pre sisanja u dozator zagrejati na 80°C tokom 5 do 10 minuta, kako bi se oslobodila apsorbovane vode.

Sipajte so u posudu mlina. Maksimalna količina soli koja se može sipati odjednom je 40g.

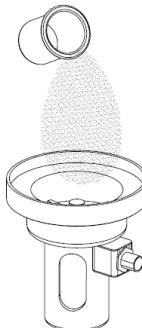


## 2. Uključivanje uređaja.

Zatvorite vrata halogeneratora i zaključajte ih.

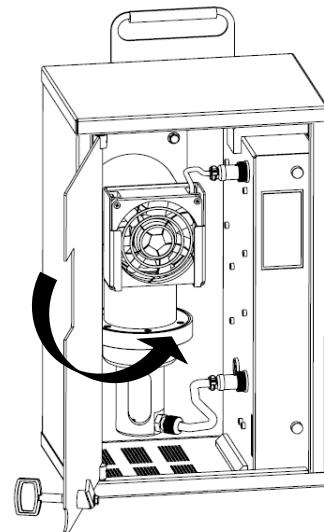

Uključite glavni prekidač (položaj "1").

**Napomena:** Glavni prekidač se nalazi sa donje strane uređaja.

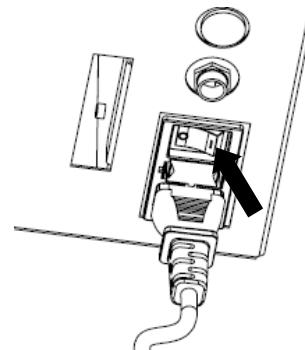


# Kako koristiti uređaj

Uređajem se upravlja pritiskom prsta na ikonice prikazane na ekranu ili preko udaljenog bežično konektovanog uređaja.

Ako se ekran pritisne na mestu gde je nacrtana komanda, uređaj će se oglasiti kratkim piskom. Na taj način korisnik ima bolji osećaj kontrole uređaja.


**Napomena:** Da bi Vaš uređaj radio dugo i bez problema, molimo Vas ne pritiskajte ekran vrhovima noktiju ili nekim tvrdim predmetom, već samo jagodicama prstiju.

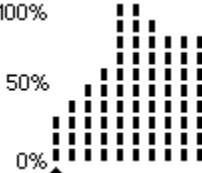Opis ikona na LCD ekranu	
Taster za izbor podešavanja trajanja seanse. Vreme trajanja prikazuje se brojčano sa desne strane tastera.	
Taster za izbor programa.	
Taster za podešavanje protoka vazduha.	
Tasteri za izbor koraka seanse.	
Bar graf za prikaz načina doziranja soli.	
Taster za pokretanje seanse.	
Taster za pauziranje seanse.	
Taster za prekidanje seanse.	
Taster za povećanje vrednosti izabranog parametra.	
Taster za smanjenje vrednosti izabranog parametra.	
Taster za potvrđivanje podešavanja.	

# Kako koristiti uređaj

## 1. Podešavanje trajanja seanse

Pritisnite taster ili prikazano vreme trajanja seanse. Pojaviće se meni za podešavanje trajanja seanse. Pritiskom na tastere i treba podesiti trajanje. Najduže trajanje seanse je 99 minuta. Podešeno vreme trajanja prikazuje se u sredini ekrana. Pritisnite da potverdite podešavanja.

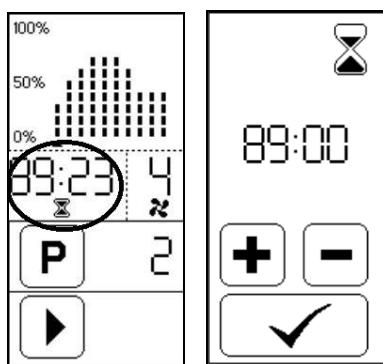


## 2. Izbor programa

Program rada sadrži vreme trajanja seanse i način doziranja soli. Za izbor programa pritisnite taster . Pritiskom na taster izaberite željeni program rada od 1 do 9. Svako pritiskanje tastera će povećati broj programa za jedan, po redosledu P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P1.

## 3. Podešavanje načina doziranja


Način doziranja soli prikazuje se na bar grafu . Vreme trajanja seanse podeljeno je na 10 jednakih delova. Svakom delu odgovara jedna kolona bar grafa. U svakom delu trajanja seanse moguće je podesiti količinu soli od 0% do 100% kapaciteta uređaja.

Pritisnite prikazani bar graf. Pojaviće se meni za podešavanje načina doziranja. Pritiskanjem tastera pomera se cursor ispod bar grafa za prikaz načina doziranja soli. Kursor treba dovesti ispod kolone čija vrednost treba da se promeni. Pritiskom na tastere i moguće je podesiti količinu soli od 0% do 100% u koracima po 10%. Pritisnite da potverdite podešavanja.

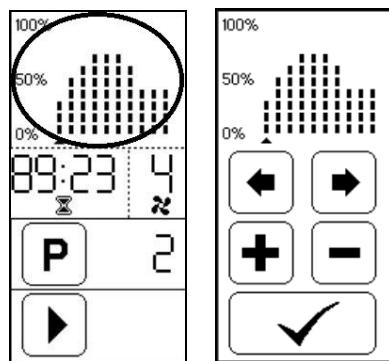

## 4. Podešavanje protoka vazduha

Pritisnite taster  ili prikazan broj pored njega. Pojavice se meni za podešavanje protoka vazduha. Pritiskom na tastere  i  moguće je podešiti protok vazduha u vrednostima od 1 do 9. Pritisnite  da potvrdite podešavanja.

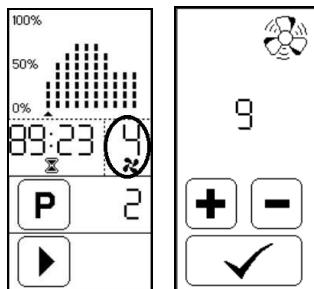

## 5. Pokretanje seanse

Uređaj se pokreće pritiskom na taster . Seansa će započeti ako su vrata halogeneratora zatvorena i mlin nije blokiran. Po pokretanju taster  menja izgled u , a taster  se pojavljuje na ekranu. Vreme počinje da odbrojava unazad, a cursor ispod bar grafa se pomera tokom trajanja seanse i pokazuje u kom od 10 koraka je trenutno. Kada istekne podešeno vreme programa, uređaj se automatski zaustavlja, uz zvučnu signalizaciju.

U toku seanse moguće je naknadno podešavanje količine aerosola i protoka vazduha. U toku seanse nije moguća promena njenog trajanja.

Uređaj se neće pokrenuti kada su vrata na halogeneratoru otvorena i nisu zaključana, ako je mlin zaglavljen ili je osigurač mlina pregoreo. Na ekranu će se pojaviti opis greške.



Blokiran mlin



Osigurač  
mlina je  
pregoreo

Posle otklanjanja uzroka problema treba pritisnuti taster  i ponovo pokrenuti uređaj.

## 6. Privremeno zaustavljanje

Uređaj može da se pauzira pritiskom na taster , koji tada menja izgled u . Prekinuće se stvaranje aerosola i odbrojavanje preostalog vremena do kraja seanse.

Seansa u svakom trenutku može da se nastavi ponovnim pritiskom na isti taster. Vreme trajanja nastavlja da se odbrojava unazad od trenutno zapamćene vrednosti.

## 7. Prevremeno zaustavljanje

U svakom trenutku seansa može da se prekine pritiskom na taster . Na ekranu uređaja će se prikazati početna strana. Podešene vrednosti protoka vazduha i brzine stvaranja aerosola ostaju na ekranu, a vreme trajanja vraća se na početnu vrednost.

# Završetak korišćenja

**Po završetku upotrebe uređaja treba:**

- 1** Isključite glavni prekidač uređaja (pozicija "0").
- 2** Izvući kabl za napajanje iz električne utičnice.
- 3** Očistiti uređaj.

**Napomena:** Neophodno je detaljno očistiti uređaj od naslaga soli na kraju svakog radnog dana. Ako se ne očiste, naslage soli na mlinu smanjiće efikasnost halogeneratora i koncentraciju soli u slanoj sobi.

**U prostorima sa povećanom vlažnošću i/ili u klimatizacijom može doći do povećanog taloženja soli unutar uređaja. U takvim uslovima neophodno je čistiti uređaj više puta tokom radnog dana.**

**Naslage soli mogu da prouzrokuju kvar na uređaju.**

**U slučaju krajnjeg nemara i nečišćenja, naslage soli mogu da blokiraju obrtanje ventilatora ili mlina. Tada su mogući kvarovi na delovima uređaja (motor ventilatora ili mlina).**

## **Upozorenje**

Pre rasklapanja i čišćenja uređaja obavezno isključiti napajanje uređaja i isključiti kabl za napajanje iz utičnice.

- Možete doživeti strujni udar ili se povrediti.



## Čišćenje proizvoda

Proizvod zahteva čišćenje soli iz unutrašnjosti uređaja posle upotrebe.  
Sve delove uređaja treba čistiti mekom suvom tkaninom ili suvom četkicom.

### Opšte preporuke


- Ne brišite kućište isparljivim tečnostima, kao što je benzin ili razređivač.
- Ne brišite vrata alkoholom.

## 1. Priprema za čišćenje

Isključite uređaj.

Otključajte vrata uređaja i otvorite ih.

Locirati pozicije konektora za napajanje ventilatora i mlina.

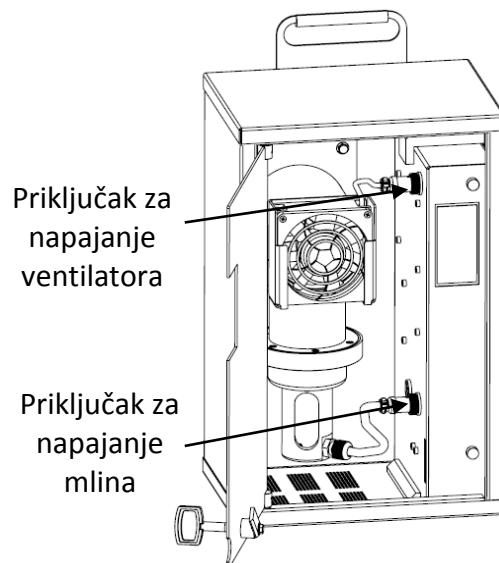

## 2. Isključenje priključka za napajanje

Isključiti konektore za napajanje ventilatora i mlina.

Isključivanje konektora u dva koraka:

1. Na vrhu konektora je sigurnosni prsten, koji sprečava otkačinjanje konektora. Uhvatiti sigurnosni prsten prstima i NEŽNO ga zarotirati u smeru obrnutom od kazaljke na satu dok se ne oseti otpor.
2. Nežno izvući konektor na dole.

Uočiti vođice na konektoru.

Vođice sprečavaju nepravilno priključenje konektora.


Priklučenje konektora treba obaviti u obrnutom redosledu od isključenja: rotirati konektor dok se vođice konektora ne poravnaju, NEŽNO postavite konektor na mesto i zarotirati SIGURNOSNI prsten dok se ne oseti otpor.

# Održavanje proizvoda

## 3. Čišćenje ventilatora


Uhvatiti rukom ventilator.

Povući ventilator naviše i izvaditi ga iz halogeneratora.

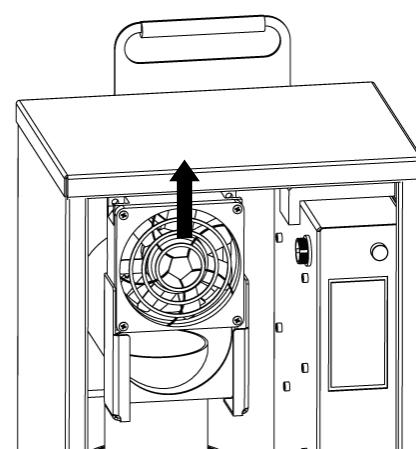


Očistiti suvom četkom naslage soli sa svih unutrašnjih površina tela halogeneratora.

Očetkati suvom četkicom naslage soli sa svih površina ventilatora.

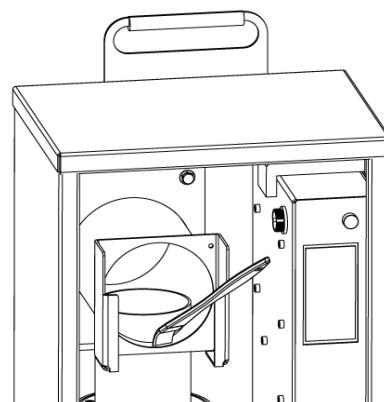

## 4. Čišćenje mlina


Uhvatiti rukom prirubnicu mlina i zarotirati je.

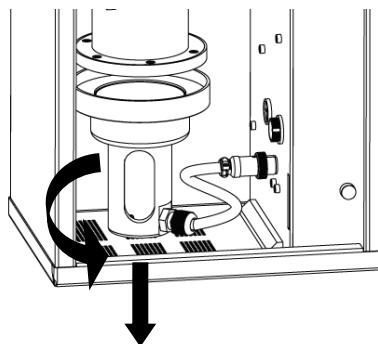

Povući mlin na dole i izvaditi ga iz halogeneratora.

Očistiti so sa svih površina mlina. Ne zaboraviti na čišćenje svih površina između noža i prirubnice mlina.  
Iščetkati suvom četkicom so sa unutrašnjih površina vertikalne cevi.

Iščetkati svu so sa dna kućišta halogeneratora.

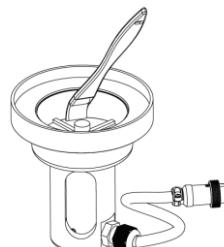

## 5. Sklapanje halogeneratora

Uređaj se sklapa u redosledu obrnutom u odnosu na opisani redosled rasklapanja, sve dok se uređaj ne vrati u početno stanje.

<b>⚠️ Upozorenje</b>	
Očišćene navlažene metalne delove treba odmah osušiti. • Može doći do korozije nekih metalnih delova.	
Ne čistite vrata alkoholom. • Alkohol može oštetiti plastiku.	
Ne perite kućište uređaja vodom, niti prosipajte vodu na električne vodove i priključke. • Možete doživeti strujni udar ili može doći do oštećenja uređaja.	

## Skladištenje proizvoda

Ako se planira da uređaj ne radi duže vreme:

1. Pažljivo očistiti so iz halogeneratora.
2. Postavite plastični poklopac na otvor za dodavanje soli.
3. Zatvoriti halogenerator.

# Problemi u radu

## Problemi u radu

Problem	Proveriti	Ispraviti
Displej se ne uključuje.	Da li je kabl za napajanje utaknut u električnu mrežu?	Priklučiti pravilno kabl za napajanje.
	Da li je glavni prekidač u položaju "1"?	Postaviti glavni prekidač u položaj "1".
	Da li su pregoreli osigurači prekidača?	Zameniti osigurače.
Uređaj ne stvara aerosol ili je smanjena količina aerosola.	Da li u posudi za so ima soli?	Dodati so u posudu za so.
	Da li je priključen konektor za napajanje dozatora?	Priklučiti konektor za napajanje dozatora.
	Da li je priključen konektor za napajanje ventilatora?	Priklučiti konektor za napajanje ventilatora.
	Da li je priključen konektor za napajanje mlina?	Priklučiti konektor za napajanje mlina.
	Da li je zaprljan mlin?	Očistiti mlin.
	Da li su otvorena ili otključana vrata halogeneratora?	Zatvoriti i zaključati vrata halogeneratora.
Na ekranu se pojavljuje simbol "blokiran mlin"	Proveriti naslage soli oko i ispod obrtnih delova mlina.	Malom četkicom pažljivo očistiti svu so sa mlina i naslage soli ispod noža mlina.
Na ekranu se pojavljuje simbol "osigurač mlina je pregoreo"	Da li je pregoreo osigurač mlina?	Zameniti osigurač.

- Ako posle navedenih mera uređaj ne proradi normalno, ne rasklapajte uređaj, isključite ga iz električne mreže i obavestite prodavca od koga ste kupili uređaj ili servis PRIZME.

# Ispravno odlaganje proizvoda



## Ispravno odlaganje proizvoda (električni i elektronski otpad)

Ovaj simbol na proizvodu ili u uputstvu označava da ga na kraju životnog veka ne treba deponovati sa ostalim komunalnim otpadom. Da bi se sprečila šteta po okolini ili zdravlje ljudi, molimo da ga predate na reciklažu i tako promovišete održivu upotrebu materijala.

Lični korisnici treba da se obaveste kod dobavljača ili lokalnih vlasti o detaljima gde i kako mogu da predaju uređaj na reciklažu.

Poslovni korisnici treba da se obaveste kod dobavljača i provere uslove u kupoprodajnom ugovoru. Ovaj uređaj ne sme da se meša sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ovaj proizvod ne sadrži opasne supstance.

## Simboli



= Upozorenje: Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu



= Pravilno deponovati proizvod



= Ne otvaraj! Sesija u tok!



Proizvođač : PRIZMA Kragujevac d.o.o.  
Kumanovska 8  
34000 Kragujevac, Srbija



# Specifikacije

## Tehnički podaci

Ovaj uređaj ispunjava zahteve standarda EN 60335-1.

Naziv proizvoda	: PRIZMA generator suvog aerosola soli
Model	: multiSALT+
Napon napajanja	: 120 V ~ , 50/60Hz
Potrošnja električne energije	: 18 W
Osigurači	: Prekidač: 2 x T2AH/250VAC; Mlin: T1AL250VAC
Snaga RF predajnika	: +4 dBm, 2.4 GHz
Potrošnja soli	: 0-100g/h, podesivo
Protok vazduha	: 1 m <sup>3</sup> /min (35 CMF/min)
Kapacitet posude za so	: 40g
Gabariti halogeneratora	: 225 (š) x 395 (v) x 2180 (d) mm
Neto težina	: 8 kg
Radni uslovi	: 20 do 40°C (68 do 104°F), 15 do 40% RH, 700 hPa do 1060 hPa
Uslovi skladištenja	: -25 do 70°C (-13 do 158°F), 20 do 93% RH
Dodatni pribor	: Uputstvo za upotrebu (sa garantnim listom), deflektor, produžna cev, četke (2 kom) i kabl za napajanje.

- Specifikacije i izgled mogu da se promene bez prethodne najave.